

Compact 6 HD

Compact 6 HD s hlasem

Uživatelská příručka kamerové lupy

Verze 3.0

© 2019 Optelec, Nizozemsko
Všechna práva vyhrazena



Optelec
P.O. Box 399
2990 AJ Barendrecht
The Netherlands
Tel.: +31 (0)88 678 34 44
E-mail: info@optelec.nl
Internet: www.optelec.com

(T) Spektra, 2019

Obsah

1. Úvod	3
<i>O příručce</i>	3
<i>Obsah dodávky</i>	4
2. Začínáme	5
<i>Práce se čtecím stojánkem</i>	6
<i>Jak čistit objektiv a obrazovku</i>	9
<i>Ovládací tlačítka</i>	10
3. Práce s lupou Compact 6 HD s hlasem – rozpoznávání a čtení textů hlasovým výstupem	14
<i>Spuštění hlasového výstupu</i>	14
<i>Nastavení hlasitosti a rychlosti čtení</i>	15
<i>Nastavení jazyka a hlasu</i>	16
4. Nabíjení baterie	17
5. Základní a pokročilý režim	19
6. Funkce v základním režimu	20
7. Funkce v pokročilém režimu	21
Dodatek A: Prohlášení o shodě a bezpečnost	34
Dodatek B: Technické údaje	37
Dodatek C: Záruční podmínky	39

1. Úvod

Blahopřejeme Vám k zakoupení lupy Compact 6 HD či Compact 6 HD s hlasem. Tato jedinečná kapesní lupa s 6ti-palcovým dotykovým displejem v HD rozlišení Vám umožní prohlížet a zvětšovat tištěný text a obrázky v barevném fotorežimu nebo ve vysoce kontrastním zobrazení. Díky nastavitelnému rozhraní dotykového displeje si můžete lupu Compact 6 HD přizpůsobit dle vlastních potřeb.

Budete-li mít otázky k produktu nebo jiné požadavky, obraťte se na společnost, u níž jste lupu zakoupili, nebo přímo na výrobce Optelec (kontaktní údaje jsou na zadní straně této příručky). Jakákoli zpětná vazba je vítána. Přejeme příjemnou práci s lupou Compact 6 HD!

O příručce

V této příručce se seznámíte s ovládáním a se základními funkcemi lup Compact 6 HD a Compact 6 HD s hlasem. Příručku si prosím pečlivě přečtete dříve, než začnete přístroj používat.

Pokud není uvedeno jinak, všechny informace týkající se lupy Compact 6 HD platí i pro lupu Compact 6 HD s hlasem. Funkce specifické pro lupu Compact 6 HD s hlasem jsou v příručce označeny následujícím logem:



Obsah dodávky

Dodávka obsahuje:

Kamerovou lupu Compact 6 HD nebo Compact 6 HD s hlasem, čtecí stojánek

Ochranné pouzdro

Poutko na zápěstí

USB síťový adaptér s kabelem

4 typy nástavců pro různé normy síťových zásuvek (EU, USA, UK a AU)

Utěrku na čištění obrazovky

Uživatelskou příručku

Pokud by v dodávce některá položka chyběla, obraťte se prosím na svého prodejce.

2. Začínáme

Lupu Compact 6 HD položte před sebe na stůl tak, aby obrazovka směřovala nahoru a aby bílé tlačítko Momentka a oranžový vypínač byly v horních rozích dále od Vašeho těla.



Práce se čtecím stojánkem

Lupa je vybavena čtecím stojánkem. Ten lze dle potřeby vyklopit, nebo sklopit a používat lupu ve složeném stavu.



Stojánek vyklopený




Stojánek sklopený

V **rozloženém stavu** (s vyklopeným stojánkem) je obrazovka ergonomicky nakloněna pro pohodlné čtení delších textů. V této pozici se automaticky spustí čtecí kamera. Lišta s ovládacími prvky na dotykové obrazovce má tmavě modré podbarvení.

S lupou lze pracovat i ve **složeném stavu**. Uchopte přístroj rukou a zaměřte kameru (umístěnou na zadní straně zařízení) na předmět nebo text, který si chcete prohlížet nebo číst. Použití lupy se sklopeným stojánkem je vhodné pro rychlé prohlížení předmětů a dokumentů.


Lupa je dodávána vložená do čtecího stojánek. Pokud byste ji chtěli ze stojánek **vyjmout**, postupujte následovně:

1. Čtecí stojánek otevřete.
2. Dva prsty umístěte do prohlubní na zadní straně přístroje.
3. Mírným tlakem lupu ze stojánek vyjměte.

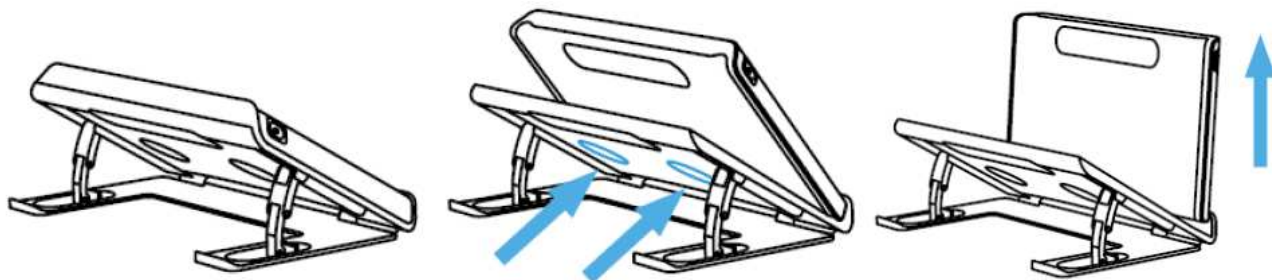

Zpět do čtecího stojánku lupu **vložíte** v následujících třech krocích:

1. Lupu nasadíte do stojánku.
2. Na lupu shora mírně zatlačíte, aby do stojánku zaklapla.
3. Lupa je nyní ve stojánku pevně usazena.

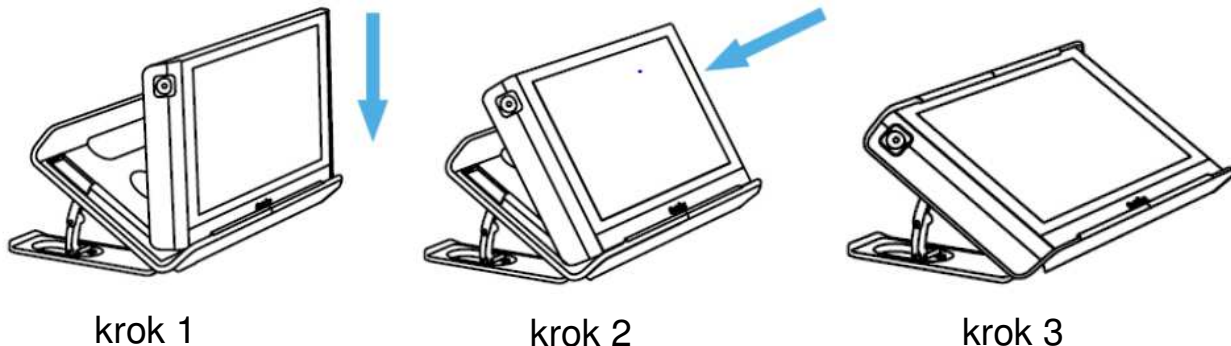

Chcete-li stojánek lupy **otevřít**, postupujte následovně:

1. Lupu položte před sebe na stůl tak, aby obrazovka směřovala nahoru a aby bílé tlačítko Momentka a oranžový vypínač byly v horních rozích.
2. Otevřete nožičky stojánku a lupa se zapne.

Chcete-li stojánek **zavřít**, postupujte následovně:





1. Lupu položte před sebe na stůl tak, aby obrazovka směřovala nahoru a aby bílé tlačítko Momentka a oranžový vypínač byly v horních rozích.
2. Stojánek zavřete mírným tlakem proti lupě směrem dolů.

Jak čistit objektiv a obrazovku

K zachování kvalitního obrazu doporučujeme udržovat čočku kamer, osvětlení a obrazovku v čistotě. Nečistoty na objektivu rozostřují obraz a mohou zapříčinit nesprávné funkce autofokusu. K čištění lupy použijte dodávanou utěrku nebo jinou měkkou utěrku na optiku.

Přístroj čistěte opatrně, měkkou utěrkou a pouze zevně – čisticími nebo mycími přípravky můžete přístroj nebo optiku poškodit!

Ovládací tlačítka

Vypínač 	Krátkým stisknutím oranžového tlačítka umístěného vlevo nahoře přepnete lupy do režimu spánku. Podržením tlačítka po dobu 3 sekund přístroj vypnete nebo zapnete.
Momentka 	Tlačítko Momentka, umístěné vpravo nahoře, umožňuje dočasně zachytit obrázek vzdálenějšího předmětu nebo textu a na obrazovce lupy si jej přiblížit. Typ Compact 6 HD s hlasem po rozpoznání textové předlohy přečte text nahlas.
Konektor USB 	Konektor USB je umístěn v pravém spodním rohu lupy. Při napájení a nabíjení lupy používejte výhradně síťový adaptér a kabel, které byly součástí dodávky. Pro připojení sluchátek použijte USB redukci na 3,5 mm jack.
Kamery 	Kamery lupy jsou umístěny na zadní straně zařízení.

Hlavní vypínač

Před prvním spuštěním je nutné lupu nabít. Nabitou lupu zapnete stisknutím oranžového tlačítka v levém horním rohu obrazovky a jeho podržením po dobu tří sekund. Lupu vypnete opětovným stiskem téhož tlačítka a jeho podržením po dobu tří sekund. Po zapnutí lupy trvá přibližně 25 sekund, než se objeví obraz.

Režim spánku

Je-li lupa Compact 6 HD zapnutá, krátkým stisknutím oranžového tlačítka ji převedete do režimu spánku. Z režimu spánku ji opět probudíte krátkým stisknutím téhož tlačítka. Po probuzení lupy se obnoví původní nastavení a obraz se objeví zhruba jednu sekundu po stisku tlačítka.

Z režimu spánku lupu probudíte také otevřením čtecího stojánku. Zavřením stojánku lupu opět převedete do režimu spánku.

Stisknutím tlačítka Momentka během režimu spánku zobrazíte na displeji lupy hodiny.

Kamery lupy Compact 6 HD

Lupa je vybavena dvěma kamerami – kamerou zvětšovací a kamerou prohlížečí. Při otevření čtecího stojánu se lupa automaticky zapne a spustí zvětšovací kameru (režim „Čtení“). Zapnete-li lupu, když je čtecí stojánek zavřený, automaticky se spustí prohlížečí kamera (režim „Náhled“). Zvětšovací kamera je uzpůsobena pro čtení delších textů ze stojánu a na rozdíl od prohlížečí kamery je optimalizována na prohlížení z menších vzdáleností. Prohlížečí kamera slouží k rychlému náhledu. Chcete-li přepnout mezi kamerami, klepněte na obrazovku a poté klepněte na ikonu lupy v horní části obrazovky.



Čtení



Náhled

Uzamčení vzdálenosti ostření

U prohlížečí kamery můžete nastavit ostření na určitou vzdálenost, což je výhodné při psaní nebo při prohlížení předmětů nacházejících se v neměnné vzdálenosti. Pro uzamčení vzdálenosti ostření klepněte na obrazovku a podržte dvě vteřiny. Pro zrušení uzamčení klepněte na tlačítko se symbolem zámku v horní části obrazovky vedle ikony pro přepínání kamery.

Používání tlačítka Momentka

Tlačítko Vám umožní pořídit dočasnou fotografii textu či prohlíženého předmětu.

1. Podržte lupu před textem nebo předmětem, který chcete vyfotografovat.
2. Stiskněte tlačítko Momentka, nacházející se na přístroji vpravo nahoře.
3. Nyní si můžete na obrazovce lupy obrázek blíže prohlédnout.
4. Opětovným stisknutím Momentky se vrátíte do režimu snímání. Můžete pořídit další obrázek.

Návod, jak uložit či smazat pořízené fotografie, naleznete v kapitole 7.



3. Práce s lupou Compact 6 HD s hlasem – rozpoznávání a čtení textů hlasovým výstupem

Jestliže vlastníte lupu Compact 6 HD s hlasem, po pořízení momentky, která obsahuje text, se automaticky spustí funkce rozpoznávání textu. Poté, co jej lupa rozpozná, začne nahlas předčítat.

Spuštění hlasového výstupu

Chcete-li zachytit fotografii a následně si text z ní nechat číst hlasem, postupujte následovně:

- Umístěte textovou předlohu před kameru lupy a stiskněte tlačítko Momentka. Aby byl zachycený obrázek kvalitní, dbejte na dostatek světla, ohlídejte, aby na předlohu nepadal stín. Snažte se zachytit pouze tu část textu, kterou chcete číst. Pokud zachytíte větší plochu, může se stát, že čtený text bude příliš malý a těžko rozpoznatelný.
- Zobrazí se indikátor, který ukazuje, že probíhá rozpoznávání textu. Lupa začne číst, jakmile bude rozpoznávání dokončeno.

- Pro zahájení čtení hlasem nebo jeho přerušování použijte přehrávací tlačítko v liště na obrazovce.
- Chcete-li hlasem přečíst konkrétní část textu nebo vybrané slovo, klepněte na vybranou pasáž a přidržte.
- Chcete-li zobrazit text v kontrastních barvách, klepněte na tlačítko Režim. Text se naformátuje na šířku obrazovky. Obrázky se v tomto režimu nezobrazí. Mezi různými kontrastními barevnými kombinacemi a fotorežimem přepínáte pomocí tlačítka Režim. Ve fotorežimu se ukáží i obrázky a text se bude zobrazovat v tom rozvržení, v jakém je na předloze.
- Jestliže lupa nenajde žádný text, na obrazovce se po klepnutí na přehrávací tlačítko objeví hlášení „Nenalezen text.“
- Jak změnit jazyk a hlas se dozvíte v kapitole 5.

Nastavení hlasitosti a rychlosti čtení

K nastavení hlasitosti a rychlosti čtení slouží lišta tlačítek, kterou vyvoláte klepnutím na obrazovku. Klepněte na tlačítko se symbolem zvuku (amplionu) a poté hlasitost či rychlost změňte posuvníky. Tyto volby jsou dostupné pouze při prohlížení momentek.

Nastavení jazyka a hlasu

Chcete-li v základním režimu změnit jazyk nebo hlas, přidržte přehrávací tlačítko. Tím vstoupíte do menu Hlasu.

Chcete-li změnit jazyk nebo hlas v pokročilém režimu, stiskněte tlačítko „Menu“ a poté otevřete menu Hlasu (tlačítko se symbolem mluvící osoby).

Více se o nastavení hlasu dozvíte v kapitole 7.

4. Nabíjení baterie

Lupa Compact 6 HD je dodávána s napájecím adaptérem a se čtyřmi typy nástavců pro různé normy síťových zásuvek (verze EU, USA, UK, AU). Použijte adaptér určený pro Vaši zemi.

Připojte napájecí USB kabel k síťovému adaptéru a druhý konec zapojte do bílého konektoru USB na pravé straně lupy. Napájecí adaptér zapojte do síťové zásuvky.

Nabíjení lupy trvá přibližně 2 hodiny. Plně nabitá lupa vydrží mimo síť v průměru 3 hodiny, záleží však na způsobu práce s lupou. Z bezpečnostních důvodů prosím k nabíjení lupy používejte jen kabel a síťový adaptér dodávaný s lupou.

Upozornění na vybitou baterii

Při nízkém stavu baterie Vás Compact 6 HD upozorní na nutnost nabít baterii zobrazením ikony prázdné baterie. V takovém případě zařízení co nejdříve nabijte. Při vybití se lupa automaticky vypne.

Pokud se Vám nedaří lupu zapnout, přesvědčte se, že je baterie nabitá.

Pohotovostní režim

Lupa Compact 6 HD automaticky přejde do pohotovostního režimu, když po určité době nezaznamená žádný pohyb nebo klepnutí na tlačítko. Lupa opět spustíte stisknutím oranžového tlačítka. Dobu, po níž se má lupa přepnout do pohotovostního režimu, lze nastavit v menu. Tam můžete přechod do pohotovostního režimu i zcela vypnout. Postup je popsán v kapitole 7.

5. Základní a pokročilý režim

Při prvním spuštění se lupa nachází v základním režimu. Chcete-li režim změnit, přidržte tlačítko „Režim“ a klepněte na Základní nebo Pokročilý.

V základním režimu jsou k dispozici hlavní funkce. Režim Vám umožňuje změnit velikost písma a režim prohlížení, pořídit momentku či přepínat mezi zvětšovací a prohlížečící kamerou. Pokud vlastníte variantu lupy s hlasem, text z momentky se přečte nahlas a budete si moct upravit rychlost a hlasitost čtení.

V pokročilém režimu můžete využívat stejné funkce jako v základním režimu, navíc máte k dispozici některé doplňkové funkce, jako je čas a datum, ukládání a prohlížení momentek, změna jazyka a hlasu pro čtení, změna barevných režimů, zapnutí čtecí linky, Bluetooth a Miracast a další.



Základní režim



Pokročilý režim

6. Funkce v základním režimu

Zvětšování

Chcete-li změnit míru zvětšení, jednoduše klepněte na obrazovku. V dolní nebo v pravé části obrazovky se zobrazí lišta s ovládacími tlačítky – jejich umístění závisí na zvoleném nastavení. Umístění lišty s tlačítky můžete změnit v menu (viz kapitola 7). Zvětšujete tlačítkem + a zmenšujete tlačítkem –. Pro změnu velikosti zobrazení můžete použít i gesto: tažením dvou prstů od sebe zvětšujete, tažením prstů k sobě zmenšujete. Lištu s tlačítky schováte klepnutím na obrazovku, nebo sama automaticky zmizí 10 vteřin od posledního dotyku na obrazovce.

Volba prohlížečícího režimu

Klepnutím na tlačítko Režim (symbol čtverce uprostřed lišty tlačítek) přepínáte mezi následující režimy prohlížení:

- **Fotorežim:** Prohlížení barevných textů a obrázků.
- **Kontrastní negativ:** Zobrazení ve vysokém kontrastu, bílá na černé.
- **Kontrastní pozitiv:** Zobrazení ve vysokém kontrastu, černá na bílé.
- Kontrastní **barevná kombinace 1.**
- Kontrastní **barevná kombinace 2.**

7. Funkce v pokročilém režimu

Nastavení data a času

Chcete-li zobrazit hodiny, klepněte na obrazovku a pak klepněte na ikonu hodin u pravého okraje obrazovky.

Chcete-li z nastavení data a času vystoupit, klepněte na modrou lištu s trojúhelníkem. Pro nastavení data a času klepněte na datum či čas. Pro změnu hodnoty klepněte na políčko, které chcete změnit, a poté na symbol šipky nad ním nebo pod ním. Když jste s nastavením spokojeni, klepněte na modrou lištu s trojúhelníkem.

Menu

Otevření a zavření menu

Menu otevřete tak, že klepnete na obrazovku a poté klepnete na ikonu Menu (symbol vodorovných čar) v levé části obrazovky. Menu zavřete tak, že klepnete na modrou lištu s trojúhelníkem.



Konkrétní položky menu se mohou lišit v závislosti na typu lupy, kterou jste si zakoupili (s hlasem či bez hlasu). Položky menu otevřete klepnutím. Z podnabídky zpět do hlavního menu se vrátíte klepnutím na modrou lištu s trojúhelníkem. Měníte-li hodnotu posuvníkem, posuvník přidržte a posuňte ho doprava či doleva.

Hlavní menu obsahuje následující položky:

- Hlas (pouze Compact 6 HD s hlasem)
- Linka zapnutá/vypnutá
- Stav baterie
- Uložit
- Otevřít
- Posuvník pro nastavení jasu obrazovky
- Nastavení



Hlas (pouze Compact 6 HD s hlasem)

Chete-li si vybrat hlas, jazyk hlasového výstupu či jazyk menu nebo chcete-li jazyk či hlas přidat nebo odebrat, otevřete menu a klepněte na tlačítko „Hlas“.

Výběr hlasu a jazyka

Chcete-li změnit hlas a jazyk pro čtení, klepněte na ikonu hlasu v levém horním rohu hlavního menu. Otevře se seznam s předem navolenými hlasy – každý hlas reprezentuje jeden jazyk. Klepněte na vybraný hlas. Pokud při změně hlasu dojde současně ke změně jazyka, automaticky se změní také jazyk menu.

Přidání či odebrání hlasu nebo jazyka

Klepněte na ikonu hlasu v levém horním rohu hlavního menu. V seznamu předem navolených hlasů klepněte na tlačítko „Přidat/Odebrat“, pak klepněte na jazyk. Tím se zobrazí seznam hlasů dostupných pro daný jazyk. Klepněte na zvolený hlas. Zaškrtnuté políčko před názvem hlasu ukazuje, že hlas je aktivní. Je-li hlas aktivní, znamená to, že bude dostupný pod nabídkou „Hlas“ v hlavním menu. Pokud zaškrtnutí u hlasu zrušíte, hlas bude z nabídky v hlavním menu odstraněn. Jazyky, u kterých je aktivován hlas, se zobrazí na začátku seznamu a budou zaškrtnuté.

Změna jazyka a hlasu v základním režimu

V základním režimu nelze vstoupit do menu. Chcete-li změnit jazyk či hlas, přidržte přehrávací tlačítko. Tím vstoupíte přímo do nastavení Hlasu. Pokračujte dále podle pokynů uvedených výše.

Linka zapnutá/vypnutá

Lupa umožňuje nastavit vodící linku pro čtení, která lupu pomůže přesněji umístit na čtený dokument. Pro zobrazení vodící linky klepněte na tlačítko „Linka“. Vodící linku skryjete, jestliže na dané tlačítko klepnete znovu.

Stav baterie

Ikona pro stav baterie se zobrazuje v pravém horním rohu obrazovky. Po klepnutí na ikonu se otevře nová obrazovka se zvětšenou ikonou baterie ukazující její stav, tlačítko „O aplikaci“ a šipka zpět, která Vás vrátí do hlavního menu. Jestliže je na ikoně baterie obrázek blesku, znamená to, že se baterie nabíjí.

O aplikaci

Klepnutím na tlačítko „O aplikaci“ zjistíte verzi aplikace.

Uložit

Chcete-li uložit momentku, postupujte takto:

- Fotografii zachytíte stisknutím tlačítka Momentka.
- Otevřete menu.
- Klepněte na tlačítko „Uložit“.
- Menu se zavře a na obrazovce se objeví zachycená fotografie.

Jestliže nebyla zachycena žádná fotografie, nebo byla zachycená fotografie již uložena, tlačítko „Uložit“ se nezobrazí.

Otevřít

Chcete-li otevřít momentku, otevřete menu a klepněte na tlačítko „Otevřít”. Zobrazí se seznam zachycených fotografií seřazený od nejnovějších. Jestliže se seznam obrázků nevejde na obrazovku, můžete jej posouvat tak, že přejedete prstem od dolního okraje obrazovky k hornímu a naopak. Zvolený obrázek otevřete klepnutím na jeho náhled.

Odstranění fotografie

Chcete-li smazat zachycený obrázek, otevřete menu a klepněte na tlačítko „Otevřít”. Otevře se nová obrazovka, na níž klepnete na tlačítko „Odstranit”. Zobrazí se seznam zachycených obrázků seřazený od nejnovějších. Každý náhled obrázku má vpravo nahoře zaškrtačací políčko. Klepnutím na políčko vybraného obrázku dojde k jeho zaškrtnutí. Zvolené obrázky smažete klepnutím na tlačítko „Odstranit”. Chcete-li smazat všechny obrázky, žádný obrázek neoznačujte, jen klepněte na tlačítko „Odstranit”. Budete požádáni o potvrzení. Chcete-li všechny obrázky odstranit, klepněte na „Ano”, v opačném případě zvolte „Ne”. Obě volby Vás vrátí zpět do seznamu zachycených obrázků. Chcete-li se vrátit zpátky do menu „Otevřít”, klepněte na modrou lištu s trojúhelníkem. Když na modrou lištu s trojúhelníkem klepnete ještě jednou, vrátíte se do hlavního menu.

Nastavení jasu obrazovky

Ke zvýšení či snížení jasu obrazovky použijte posuvník s ikonou sluníčka.

Nastavení

Menu „Nastavení“ otevřete klepnutím na tlačítko Nastavení. Toto tlačítko je označeno ikonou s ozubeným kolečkem a je umístěno vpravo dole. Menu Nastavení obsahuje tato tlačítka:

- Barvy
- Zobrazení (pouze Compact 6 HD s hlasem)
- Miracast
- Bluetooth (pouze Compact 6 HD s hlasem)
- Linka
- Tlačítka
- Motiv
- Sloupce (pouze Compact 6 HD s hlasem)
- Světla
- Zvuk
- Pohotovostní režim

- Jazyk (pouze Compact 6 HD)
- Obnovit

Barvy

Kontrastní barevné kombinace pro zobrazený text si vybíráte v menu Nastavení pomocí tlačítka „Barvy”.

Compact 6 HD nabízí čtyři režimy vysoce kontrastního zobrazení. Pro každý režim si můžete zvolit barvu popředí a pozadí, a to následovně:

1. Klepněte na číslo režimu, jehož barvy chcete změnit (každé číslo reprezentuje jeden režim).
2. Mezi dostupnými barevnými kombinacemi přepínáte pomocí šipek nahoru a dolů.
3. Režimy 2, 3 a 4 můžete deaktivovat klepnutím na symbol X (ten naleznete také přepínám šipek nahoru a dolů).
4. Až se budete chtít vrátit zpět do menu nastavení, klepněte na modrou lištu se šipkou.



Zobrazení (pouze Compact 6 HD s hlasem)

V menu Nastavení klepněte na tlačítko “Zobrazení”. Zvolte buď tlačítko Režim, chcete-li cyklicky přepínat mezi dostupnými režimy zobrazení (Původní, Řádek a Sloupec), nebo tlačítko Zvýraznění, chcete-li cyklicky přepínat mezi dostupnými režimy zvýraznění (Rámeček a Podtržení).

Miracast: bezdrátové připojení k monitoru nebo TV

Funkce Miracast umožňuje bezdrátové propojení lupy Compact 6 HD s monitorem nebo televizí. Pro využití této funkce je však nezbytné, aby Váš monitor či televizor funkci Miracast podporoval (to zjistíte z uživatelské příručky Vašeho monitoru/TV).

Pro bezdrátové připojení lupy k monitoru nebo TV klepněte na tlačítko „Miracast” a funkci zapněte. Na obrazovce se objeví seznam dostupných zařízení. Klepněte na zařízení, k němuž lupu chcete připojit. Může trvat přibližně minutu, než se naváže spojení. Zařízení odpojíte opětovným klepnutím. Je-li funkce Miracast spuštěna, na připojený monitor či TV se přenáší obraz i zvuk z lupy. Pro zajištění bezchybného přenosu je třeba, aby se lupa nacházela ve vzdálenosti do jednoho metru od připojeného monitoru nebo TV. V závislosti na kvalitě připojení se může při přenosu obrazu a/nebo zvuku objevit malá prodleva.



Bluetooth (pouze Compact 6 HD s hlasem)

Přes Bluetooth můžete k lupě Compact 6 HD připojit reproduktor nebo sluchátka. Postupujte tak, že klepnete na tlačítko Bluetooth a funkci Bluetooth spustíte. Zobrazí se seznam spárovaných zařízení.

Jestliže se nezobrazí žádné dostupné zařízení pro spárování, klepněte na tlačítko „Vyhledat“. Nejprve se však ujistěte, že reproduktor nebo sluchátka, která chcete s lupou propojit, jsou zapnutá a jsou pro Bluetooth viditelná. Pro spárování pak na obrazovce lupy klepněte na zařízení, které chcete připojit, a je-li vyžadován PIN, zadejte ho (PIN naleznete v uživatelské příručce reproduktoru/sluchátek).

Nyní zařízení můžete připojit, a to tak, že na něj klepnete. Budete dotázáni, zda chcete lupu se zařízením skutečně propojit. Klepněte na tlačítko „Připojit“. Že je zařízení k lupě připojené, poznáte podle označeného zaškrťovacího políčka před názvem zařízení a modrého podbarvení.

Pro odpojení zařízení klepněte na tlačítko „Odpojit“. Zařízení bude ze seznamu spárovaných zařízení odebráno.

Pozn.: Podporovány jsou pouze reproduktory a sluchátka ve verzi Bluetooth 4.0 a vyšší.

Linka

Zde můžete nastavit umístění vodící linky na jednu z šesti možných pozic: vodorovně nahoře, vodorovně uprostřed, vodorovně dole, svisle vlevo, svisle uprostřed, svisle vpravo. V továrním nastavení je čtecí linka umístěna vodorovně uprostřed.

Tlačítka

Zde můžete nastavit umístění lišty tlačítek na jednu ze dvou pozic: spodní okraj obrazovky nebo strana obrazovky. Ve výchozím nastavení je to spodní okraj obrazovky. *Mějte prosím na paměti, že lišta tlačítek se může lišit s ohledem na používané příslušenství.*

Motiv

Zde si můžete vybrat světlý nebo tmavý motiv pro tlačítka a menu.



Sloupce (pouze Compact 6 HD s hlasem)

Zde si lze nastavit, zda bude lupa číst pouze celé sloupce, nebo i sloupce neúplné. Ve výchozím nastavení je nastaveno čtení pouze celých sloupců. *Mějte prosím na paměti, že pokud zvolíte čtení neúplných sloupců, některé znaky a slova nemusí být správně vyfotografovány a rozpoznány.*

Světla

Zde můžete zapnout či vypnout osvětlení pro režim čtení a náhledu. Světla pro čtení jsou umístěna na levé a pravé straně kamery pro čtení. Ve výchozím nastavení jsou z důvodu zajištění co nejvyšší kvality snímaného obrazu zapnutá. Světlo pro náhled je umístěno vedle kamery pro náhled. Ve výchozím nastavení je vypnuté.

Zvuk

Zde můžete vypnout a zapnout zvukovou odezvu nebo odezvu v podobě vibrací. Oboje je ve výchozím nastavení zapnuto.

Pohotovostní režim

Zde si můžete nastavit, po jak dlouhé době nečinnosti se lupa přepne do pohotovostního režimu. V továrním nastavení je tato doba nastavena na 4 minuty. Lupa následně probudíte stisknutím jakéhokoli tlačítka.

Jazyk (pouze Compact 6 HD)

Zde si můžete změnit jazyk menu. Mezi jazyky přepínáte klepnutím.

Obnovit

Zde můžete obnovit výchozí (tovární) nastavení lupy. Nejprve budete dotázáni, zda skutečně chcete tovární nastavení obnovit. Pro obnovení klepněte na „Ano“, pro zrušení „Ne“.

Dodatek A: Prohlášení o shodě a bezpečnost

Použití: Compact 6 HD lze používat ve zdravotnických zařízeních pro obecné účely, např. při kontrole zdravotních záznamů. Compact 6 HD se nesmí používat při operacích nebo životně důležitých zákrocích. **Pozor:** Důležitá diagnostická rozhodnutí se nesmí opírat o obrazové informace zobrazované tímto přístrojem.

- Nevystavujte přístroj nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu světlu, riskujete poškození či vznícení.
- Neotvírejte bateriový prostor, baterie není uživatelsky vyměnitelná. Přístroj neotvírejte ani neodstraňujte žádné jeho části, ztratili byste záruku. **Opravu svěřte pověřenému servisu.**
- Nevystavujte přístroj vlhkosti, působení chemikálií či jiných tekutin.
- Lupu neupustíte, neklepněte s ní, ani ji nezatěžujte tlakem. Mohli byste poškodit lupu, objektiv nebo monitor.
- Nepracujte s lupou v blízkosti nedostatečně odstíněných zdravotnických zařízení.
- Nepracujte s lupou v blízkosti elektromagnetických zařízení, radiových vysílačů nebo vedení vysokého napětí.

- Před čištěním přístroj vždy vypněte a odpojte od sítě. Přístroj čistěte opatrně, měkkou utěrkou a pouze zevně – čisticími nebo mycími přípravky můžete přístroj nebo optiku poškodit.

Varování: Přístroj připojujte jen do elektrické zásuvky s uzemněním, jinak hrozí úraz elektrickým proudem.

Pozor: Síťový adaptér je součástí dodávky přístroje Compact 6 HD. Používejte jen dodávaný síťový adaptér.

Pokud při práci s lupou nebudete dodržovat pokyny této příručky, můžete přístroj poškodit a ztratit nárok na záruční opravu.



Pozor, prostudujte průvodní dokumentaci.



Řiďte se provozním návodem nebo uživatelskou příručkou.

Režim STAND-BY.



Stejnoseměrný proud.

RoHS

Tento výrobek vyhovuje direktivě 2002/95/EU (RoHS) a jejím dodatkům.

CE

Výrobky označené značkou shody CE vyhovují direktivě EMC (2004/108/EC), direktivě MDD (2007/47/EC) a direktivě pro nízkonapěťová zařízení (2006/95/EC) vydanými komisí EU.

Výrobek tedy splňuje tyto standardy:

EMC: EN 55022, EN 55024, EN 60601-1-2

FCC: FCC part 15 Class B

Bezpečnost: UL 60950-1, EN 60601-1-1

Varování: Příklad musí být instalovaný ve shodě s předpisy EMC (elektromagnetická kompatibilita). Při použití jiných propojovacích kabelů nebo příslušenství než dodaných výrobcem může vést k vyššímu elektromagnetickému vyzařování.



Toto zařízení je nositelem značky shody CE a FCC.

Dodatek B: Technické údaje

Zvětšení	0,5 až 21 krát
Režimy prohlížení	Barevný fotorežim Kontrastní negativ (bílá na černé) Kontrastní pozitiv (černá na bílé) Kontrastní barevná kombinace 1 Kontrastní barevná kombinace 2
Zaostřování	Automatické zaostřování (autofokus)
Kontrastní poměr	700:1
Vysoký jas	350 cd/m ²
Obrazovka	Širokoúhlá TFT 5,94" (15 cm); rozlišení 1280 x 720
Provoz z baterie	v průměru 3 hodiny provozu, doba nabíjení 2 hodiny
Baterie	Lithium-poly (Li-poly), dobíjitelné 3,7V; 2600 mAh
Síťový adaptér	Intertek, MX15Z-0502500VU; vstup 100-240V, 50-60Hz, 0,4A; vstup lupy DC5V-2,5A.
Rozměry	183 x 95 x 14 mm
Hmotnost	270 g (se čtecím stojánkem 380 g)

Doporučené provozní podmínky:

Teplota:	10° – 35° C
Relativní vlhkost:	< 70%, bez kondenzace
Nadmořská výška:	do 3000 m
Tlak:	700 – 1060 hPa

Skladovací a přepravní podmínky:

Teplota:	10° – 40° C
Relativní vlhkost:	< 95%, bez kondenzace
Nadmořská výška:	do 12192 m
Tlak:	186 – 1060 hPa

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte jiné příslušenství, adaptér ani jiné propojovací kabely než dodávané výrobcem. V opačném případě můžete přístroj poškodit nebo zvýšit jeho vyzařování.

Dodatek C: Záruční podmínky

Na výrobek poskytuje dodavatel záruku 24 měsíců ode dne prodeje a záruka se vztahuje na všechny vady, které vznikly následkem vadného materiálu, chybné montáže či opracováním. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným zacházením nebo z jiného důvodu než uvedeného. Zásah do výrobku jinou osobou než pověřeným servisem zbavuje dodavatele ručebního závazku za záruku. Odstranění uznané závady v záruční době provede na své náklady dodavatel, dopravní náklady do servisu a ze servisu hradí uživatel. Výrobce si vyhrazuje právo vadnou část opravit nebo nahradit podobným nebo lepším výrobkem.

Optelec ani jeho distributor nejsou odpovědní za nepřímé nebo následné škody. Nároky uživatele jsou omezeny jen na náhradu modulů výrobku. Tato záruka platí jen při servisu v zemi, kde byl přístroj zakoupený, a jen pokud není porušené zapečetění modulů. Při požadavku na opravu mimo tyto podmínky nebo po záruční době se prosím obraťte na svého prodejce.

Výrobce Optelec nepřebírá žádnou odpovědnost, pokud je přístroj používán v rozporu s touto příručkou.

Pozn.: Akumulátorové baterie mají omezenou záruční dobu 6 měsíců a jejich životnost závisí na způsobu práce s přístrojem a na kvalitě péče o baterie. Opotřebené baterie odkládejte na určené místo.

Kontakt

Prodej a servis: Spektra v.d.n., Zátišská 1914/1, 14300 Praha 4; www.spektra.eu

Výrobce: Optelec, Breslau 4, 2993 LT Barendrecht, Nizozemí; www.optelec.com

Dovozce tohoto přístroje Spektra v.d.n. plní povinnost zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu členstvím v REMA systému s osvědčením č. 0508130212 (www.remasystem.cz).



Výrobní číslo přístroje:

