


SPEKTRA



BRAILLE eMOTION 40 RYCHLÝ PRŮVODCE

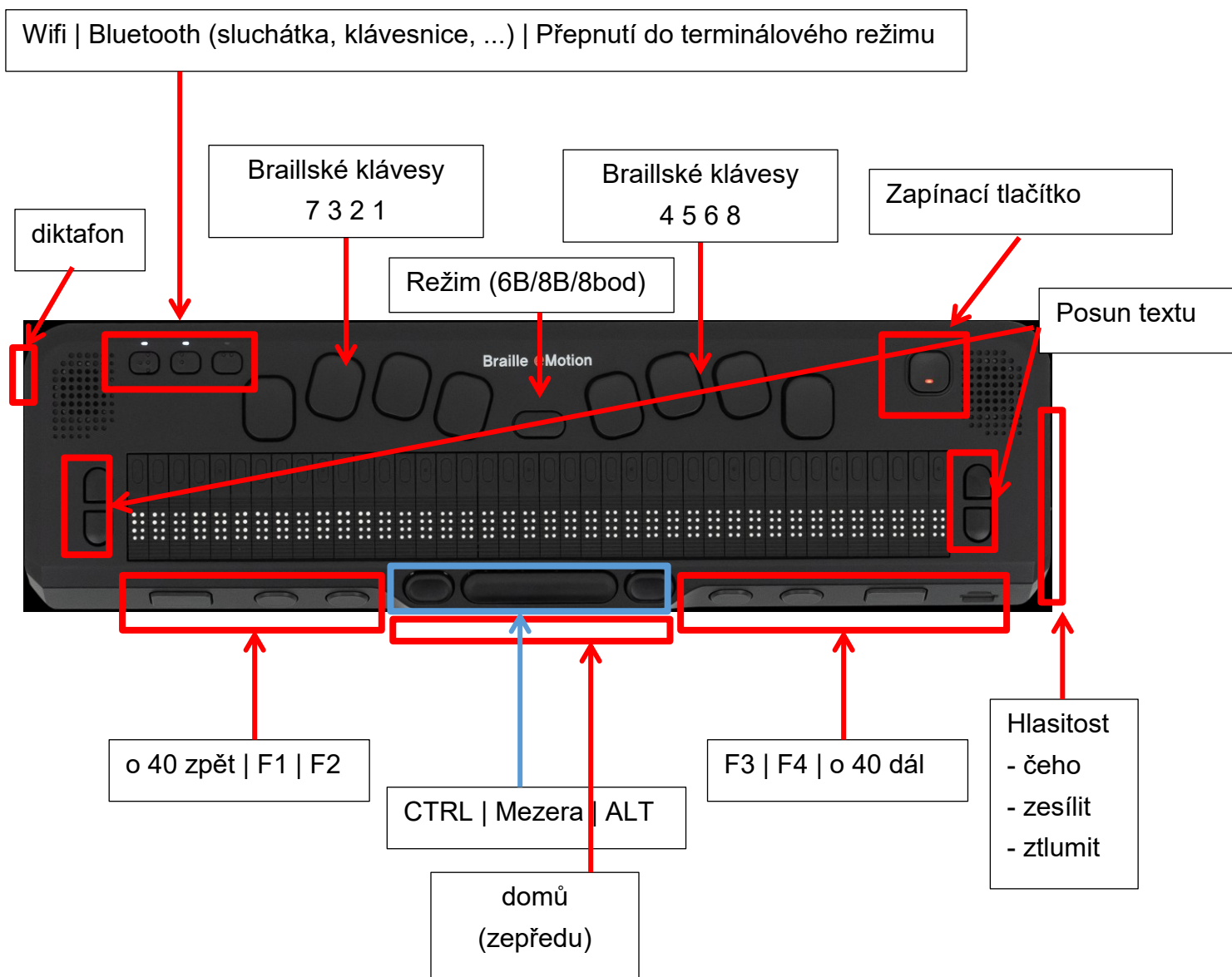

Při prvním zapnutí zařízení se spustí průvodce, který popisuje hlasem jednotlivé klávesy a možnosti. Pokud jej budete chtít spustit později, naleznete jej v menu nastavení, rychlý průvodce.

PŘEHLED REŽIMŮ

- Autonomní režim - řádek pracuje samostatně (včetně syntézy).
- Terminálový režim - ovládá jej odečítací program z počítače či telefonu.

Po zapnutí je řádek pokaždé v autonomním režimu.

ZAPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

Braillský řádek obsahuje operační systém Android a zapnutí/vypnutí se chová podobně, jako v mobilním telefonu.

- Krátký stisk zapínacího tlačítka: uspání/probuzení zařízení.
 - Běžící úlohy v autonomním režimu zůstávají běžet.
 - Probuzení je okamžité.
- Dlouhý stisk zapínacího tlačítka: vypnutí/zapnutí zařízení.
 - Zapnutí zařízení trvá cca 20 sekund.
 - Při startu zařízení ukazuje na braillském displeji, že startuje
 - Dokončení startu je indikováno zvukovým signálem a přečtením první položky v menu "můj eMotion".

PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI ČI TELEFONU

- Stiskem tlačítka "konektivita" (3. tlačítko zleva na horní řadě tlačítek) se řádek přepne do terminálového režimu, kdy jej ovládá odečítací program v počítači či telefonu.
- Je aktivován stejný typ připojení, jaký byl použit naposledy (USB, Bluetooth).

TYPY PŘIPOJENÍ

- V terminálovém režimu lze přepínat mezi těmito typy připojení:
 - USB (starší, legacy) pro JAWS - Režim + 1 + 3 + 6 + 7 (Režim + U + 7)
 - USB (HID) pro NVDA - Režim + 1 + 3 + 6 + 8 (Režim + U + 8)
 - Bluetooth - Režim + 1 + 2 + 8 (Režim + B + 8)
 - Seznam připojení - Režim + 1 + 2 + 3 (Režim + L).

PŘEPÍNÁNÍ MEZI AUTONOMNÍM A TERMINÁLOVÝM REŽIMEM

- Režim + mezera

Řádek vždy zahlásí aktuální položku, uživatel se při vrácení do autonomního režimu dostane na stejné místo, kde byl naposledy.

POHYB V AUTONOMNÍM REŽIMU

- Domů tlačítko - skok na první položku hlavního menu, "můj eMotion"
- Mezera + 1 - posun nahoru
- Mezera + 4 - posun dolů
- 8 - potvrzení výběru (Enter)
- 7 - krok zpět (Backspace)
- Mezera + 1 + 3 + 5 + 6 (Mezera + Z) - zavření aktuální aplikace
- Mezera + 1 + 2 + 3 + 5 (Mezera + R) - znovu přečíst položku