

## EasyLink / BraillePen a VoiceOver - přehled zkratek

Tento dokument obsahuje přehled klávesových zkratek EasyLinku pro VoiceOver a základní informace o editaci textu s EasyLinkem. Většina informací bude platit i pro jiná braillovská zařízení s VoiceOverem.

Kromě klávesových zkratek EasyLinku lze k práci s VoiceOverem využívat i dotyková gesta či klávesové zkratky zadávané z bezdrátové QWERTY klávesnice.

### Pohyb a ovládání v prostředí iOS

Funkce	Klávesy EasyLinku
Přejít na předchozí položku	Mezera+bod 1 nebo joystick vlevo
Přejít na další položku	Mezera+bod 4 nebo joystick vpravo
Přejít na předchozí položku podle nastavení rotoru	Mezera+bod 3 nebo joystick nahoru
Přejít na další položku podle nastavení rotoru	Mezera+bod 6 nebo joystick dolů
Vybrat předchozí nastavení rotoru	Mezera+body 23
Vybrat další nastavení rotoru	Mezera+body 56
Přejít na první prvek	Mezera+body 123
Přejít na poslední prvek	Mezera+body 456
Rolovat o jednu stránku nahoru	Mezera+body 3456
Rolovat o jednu stránku dolů	Mezera+body 1456
Rolovat o jednu stránku vlevo	Mezera+body 246
Rolovat o jednu stránku vpravo	Mezera+body 135
Přečíst číslo stránky nebo zobrazeného řádku	Mezera+body 34
Přejít na plochu (tlačítko Home)	Mezera+body 125
Přejít na stavový řádek	Mezera+body 234
Přejít do Ovládacího centra	Mezera+body 25
Přejít do předchozího kontejneru (jen iPad)	Shift+Mezera+bod 1
Přejít do dalšího kontejneru (jen iPad)	Shift+Mezera+bod 4
Otevřít položku (klávesa Return)	Mezera+body 36 nebo stisk joysticku
Aktivovat tlačítko Zpět, je-li dostupné	Mezera+body 12
Aktivovat tlačítko Zesílit	Mezera+body 345
Aktivovat tlačítko Ztlumit	Mezera+body 126

## Ovládání VoiceOveru

Funkce	Klávesy EasyLinku
Přečíst stránku od aktuální položky	Mezera+body 1235
Přečíst stránku od začátku	Mezera+body 2456
Pozastavit a pokračovat ve čtení	Mezera+body 1234
Zapnout / vypnout čtení	Mezera+body 134
Zapnout / vypnout clonu obrazovky	Mezera+body 123456
Zobrazit seznam všech prvků aktuální obrazovky	Mezera+body 24
Najít text na obrazovce nebo v dokumentu	Mezera+body 124
Zadat uživatelský popis aktuálnímu prvku	Mezera+body 12346
Posun textu na braillovém displeji vlevo	Mezera+bod 2 nebo levé navigační tlačítko
Posun textu na braillovém displeji vpravo	Mezera+bod 5 nebo pravé navigační tlačítko
Zapnout / vypnout historii oznámení (zobrazuje na displeji historii hlášení VoiceOveru)	Mezera+body 1345
Pohyb mezi hlášeními VoiceOveru v historii oznámení	Mezera+bod 1 / 4 nebo joystick vlevo / vpravo
Přepnout mezi braillovým zkratkopisem a plnopisem (český zkratkopis není podporován)	Mezera+body 1245
Přepnout mezi šesti- a osmibodovým zobrazením (česká braillová tabulka pro šestibodové zobrazení není k dispozici)	Mezera+body 236

## Editace textu

### Braillový kurzor

Braillový kurzor je tvořen dvěma blikajícími body vedle sebe ve dvou sousedních znacích. Levý bod kurzoru je osmý bod prvního znaku a pravý bod kurzoru je sedmý bod následujícího znaku. Když píšete, vkládá se text mezi tyto dva znaky, mezi kterými kurzor stojí. Když mažete, maže se levý z těchto dvou znaků.

### Pohyb v textu

Pro rychlý přechod na začátek či konec editovaného textu stiskněte joystick (příp. mezera+body 36).

Pro pohyb po různých úsecích textu využijte volby rotoru:

- Příkazy mezer+body 23 či mezer+body 56 nastavte rotor na hodnotu znaky, slova nebo řádky.
- Příkazy joystick nahoru (příp. mezer+bod 3) a joystick dolů (příp. mezer+bod 6) se pohybujte po nastaveném úseku textu zpět nebo vpřed.

Při označování nebo rušení označení textu příkazy mezer+body 256 a mezer+body 235 se označuje také po úsecích nastavených v rotoru.

**Tip:** Pokud budete označovat několik slov textu, je lepší postavit se na začátek označovaného textu pohybem po slovech zpět (joystick nahoru), protože kurzor tak bude stát na začátku slova, zatímco při pohybu po slovech vpřed by stál na mezeře mezi slovy, označený úsek by potom začínal touto mezerou.

### Základní úpravy

Základní příkazy pro úpravy textu naleznete pod položkou rotoru Upravit. Nastavíte-li rotor na tuto hodnotu, můžete pohybem joysticku nahoru a dolů vybírat mezi příkazy a stiskem joysticku vybraný příkaz provedete. Jsou zde k dispozici příkazy pro označování a práci se schránkou, které lze rychleji provádět i kombinacemi z EasyLinku, a dále také příkazy pro formátování písma (tučné, podtržení, kurzíva).

**Poznámka:** Pamatujte na to, že při pohybu kulatými navigačními klávesami můžete opustit pole s editovaným textem. Do pole se lze vrátit opět navigačními klávesami, braillovský displej do něj skočí také, když do něj cokoli napíšete.

### Příkazy pro editaci textu

Funkce	Klávesy EasyLinku
Nový řádek (klávesa Return)	Mezer+Control nebo Mezer+body 15
Smazat předchozí znak (tlačítko Delete)	Shift+Mezer nebo Mezer+body 145
Klávesa Tabulátor	Mezer+body 2345
Označit další úsek textu podle nastavení rotoru	Mezer+body 256
Zrušit označení úseku textu podle nastavení rotoru	Mezer+body 235
Označit vše	Mezer+body 2356
Vyjmout	Mezer+body 1346
Kopírovat	Mezer+body 14
Vložit	Mezer+body 1236
Krok zpět	Mezer+body 1356
Opakovat poslední akci	Mezer+body 2346
Klávesa Vysunout (pro skrytí nebo zobrazení dotykové klávesnice)	Mezer+body 146

## Kombinace pro rychlý pohyb na webu

Po webových prvcích určitého typu se lze rychle pohybovat jednopísmennými příkazy. Stisknete-li na EasyLinku příslušné písmeno, přesunete se na nejbližší další prvek příslušného typu, stisknete-li toto písmeno s Shiftem, vrátíte se na nejbližší předchozí prvek tohoto typu. Aby tato jednopísmenná navigace fungovala, musí být zapnutá. Zapnout či vypnout se dá kombinací Shift + Mezera + body 12345.

V tabulce níže jsou uvedena jednotlivá písmena a odpovídající typy prvků. U pohybu po nadpisech určité úrovně pomocí čísel funguje pouze pohyb vpřed.

Funkce	Klávesy EasyLinku
Další nadpis příslušné úrovně	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
Tlačítka	B
Prvky formuláře	C
Nadpisy	H
Obrázky	I
Odkazy	L
Prvky stejného typu	M
Textová pole	R
Neodkazový text	S
Tabulky	T
Oblasti stránky	W
Seznamy	X