



BLINDSHELL CLASSIC 2

TELEFON PRO ZAČÍNÁJÍCÍ UŽIVATELE



KLÁVESNICE S HMATNÝMI TLAČÍTKY



HLASITÝ REPRODUKTOR



ČESKÝ HLAS



VYTÁČENÍ ČÍSEL POMOCÍ JEDINÉHO TLAČÍTKA

TECHNICKÁ **PODPORA**

Technickou podporu a pomoc se zakoupením pomůcky vám poskytuje Spektra v.d.n.

KONTAKTUJTE NÁS



241 763 416



info@spektra.eu



ZAPNUTÍ TELEFONU: Dlouze stiskněte tlačítko ZPĚT.

ODEMKNUTÍ A ZAMKNUTÍ TELEFONU: Dlouze stiskněte tlačítko hvězdička.

NAVIGACE

- DOLŮ: pohyb na následující položku.
- NAHORU: pohyb na předchozí položku.
- POTVRZENÍ: vstup do položky menu, aktivace položky nebo přijetí hovoru.
- ZPĚT: opuštění aktuálního menu, položky seznamu nebo ukončení hovoru.

AKČNÍ TLAČÍTKA

- LEVÉ AKČNÍ TLAČÍTKO: zobrazení informací o stavu telefonu (čas, datum, úroveň baterie).
- PRAVÉ AKČNÍ TLAČÍTKO: zopakování poslední promluvy. Pro hláskování poslední promluvy stiskněte dlouze.
- POSTRANNÍ AKČNÍ TLAČÍTKO: zobrazení seznamu oblíbených aplikací. Pro aktivaci hlasového ovládání nebo diktování textu stiskněte dlouze.