



## BRAILLE eMOTION

### brailujete elektronicky a pohodlně

- 40znakový braillový řádek s 8bodovou braillovou klávesnicí
- Všestranný: podporuje běžné platformy a běžné odečítače
- Autonomní textový editor a další aplikace provozovatelné bez připojení k externímu počítači
- Výborná konektivita: WiFi, Bluetooth i kabel

#### Technická a zákaznická podpora

Spektra v.d.n. poskytuje technickou podporu i pomoc se zakoupením pomůcky  
Výukové materiály na [spektra.eu/vyuka](http://spektra.eu/vyuka)

#### Kontakt

☎ 241 763 416  
✉ [info@spektra.eu](mailto:info@spektra.eu)

# Hlavní vypínač - zapnout a vypnout řádek

- **Dlouze = zapnout / vypnout:** startuje asi 20 sec, startování ukončeno signálem a přečtením první položky menu
- **Krátce = uspat / probudit:** úlohy běžící v autonomním režimu zůstávají aktivní

## Provozní režimy

- **Autonomní režim:** řádek pracuje samostatně bez počítače (včetně hlasové syntézy)
- **Terminálový režim:** řádek je připojený k počítači nebo k telefonu a je ovládán odečítacím programem z počítače (z telefonu)

Poznámka: Po zapnutí je řádek vždy v autonomním režimu.

## Terminálový režim - připojení k počítači či telefonu

### Typy připojení v terminálovém režimu

- USB pro JAWS (starší připojení): Režim + 1 + 3 + 6 + 7 (tj. Režim + U + 7)
- USB pro NVDA (HID): Režim + 1 + 3 + 6 + 8 (tj. Režim + U + 8)
- Bluetooth: Režim + 1 + 2 + 8 (tj. Režim + B + 8); seznam BT zařízení: Režim + L

### Připojit jako terminál

- Tlačítkem Terminál (třetí tlačítko zleva v horní řadě): použije stejný typ připojení jako poslední použitý (USB, Bluetooth)
- Klávesovou zkratkou Režim + mezera: přepíná mezi autonomním a terminálovým režimem (při návratu do autonomního režimu se vrací na místo, kde byl)

## Navigace v autonomním režimu

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| ▪ Přepnout autonomní / terminál | Režim + Mezera                          |
| ▪ Zavřít aktuální aplikaci      | Mezera + Z (tj. Mezera + 1 + 3 + 5 + 6) |
| ▪ Přejít do hlavního menu       | Domů                                    |
| ▪ Posun nahoru                  | Mezera + 1                              |
| ▪ Posun dolů                    | Mezera + 4                              |
| ▪ Potvrzení výběru (Enter)      | 8                                       |
| ▪ O krok zpět (Backspace)       | 7                                       |
| ▪ Znovu přečíst položku         | Mezera + R (tj. Mezera + 1 + 2 + 3 + 5) |