

SPEKTRA



CLEARREADER

ČTECÍ ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ



SNADNÉ OVLÁDÁNÍ

Čtení se spustí jediným tlačítkem



KVALITNÍ ČESKÝ HLAS ELIŠKA

a dalších 30 jazyků



PŘENOSNÉ ZAŘÍZENÍ

Přístroj je malý a lehký, s držadlem

TECHNICKÁ **PODPORA**

Technickou podporu a pomoc se zakoupením pomůcky vám poskytuje Spektra v.d.n.


KONTAKTUJTE NÁS



241 763 416



info@spektra.eu

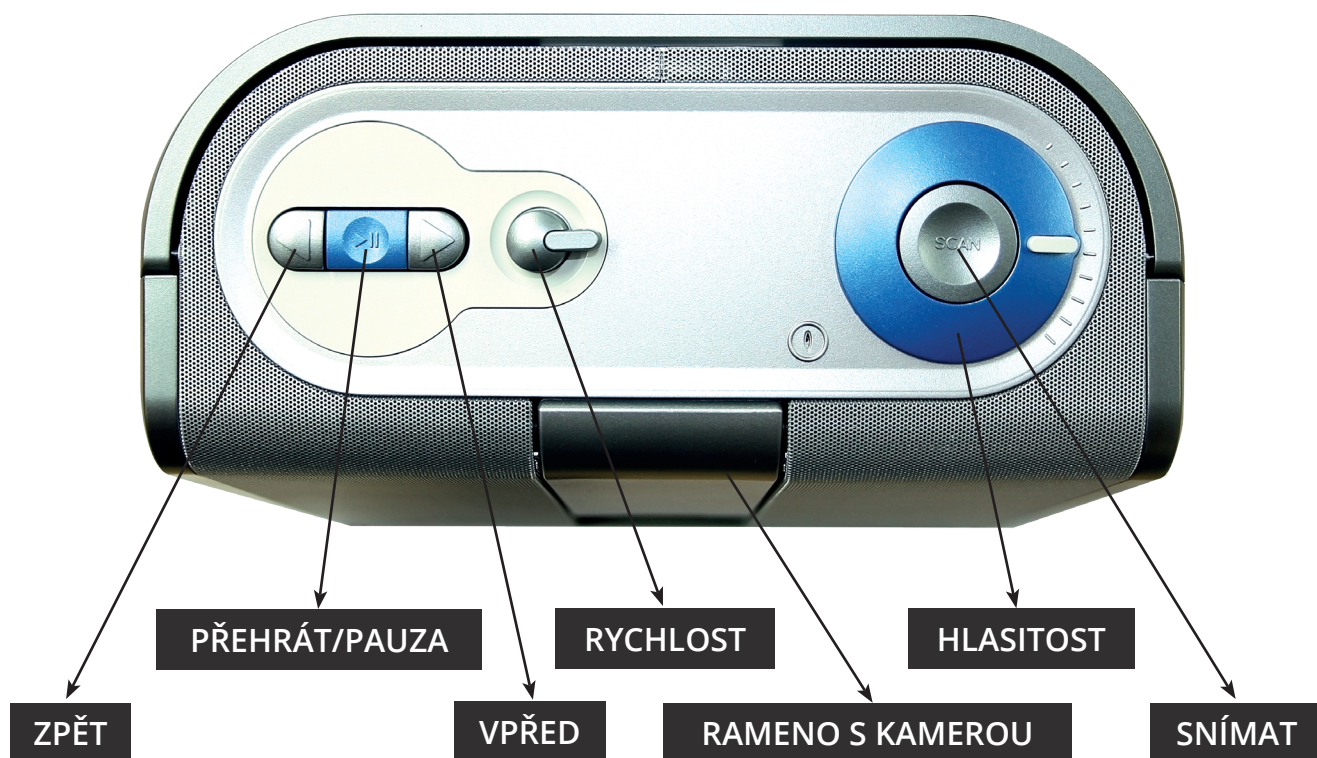

JAK SPUSTÍTE ČTENÍ

- Připojte síťový kabel.
- Jemně zatlačte na rameno s kamerou, rameno se vyklopí.
- Zapněte čtečku červeným tlačítkem na pravém boku.
Spouštění trvá asi 40 vteřin.
- Položte pod kameru text, který chcete přečíst.
- Stiskněte kruhové tlačítko SNÍMAT.
Čtečka začne po několika vteřinách číst.

JAK POZASTAVÍTE A OBNOVÍTE ČTENÍ

- Stiskněte tlačítko PŘEHRÁT/PAUZA.

POHYB PO TEXTU SMĚREM ZPĚT A VPŘED

- Stiskem tlačítka ZPĚT (VPŘED) po dobu 2 vteřin se přemístíte na předchozí (následující) větu.
- Na předchozí (následující) slovo se posunete stisknutím tlačítka PŘEHRÁT/PAUZA a poté ZPĚT (VPŘED).