


SPEKTRA



COMPACT 7 HD

PŘENOSNÁ LUPA PRO ČTENÍ V TERÉNU

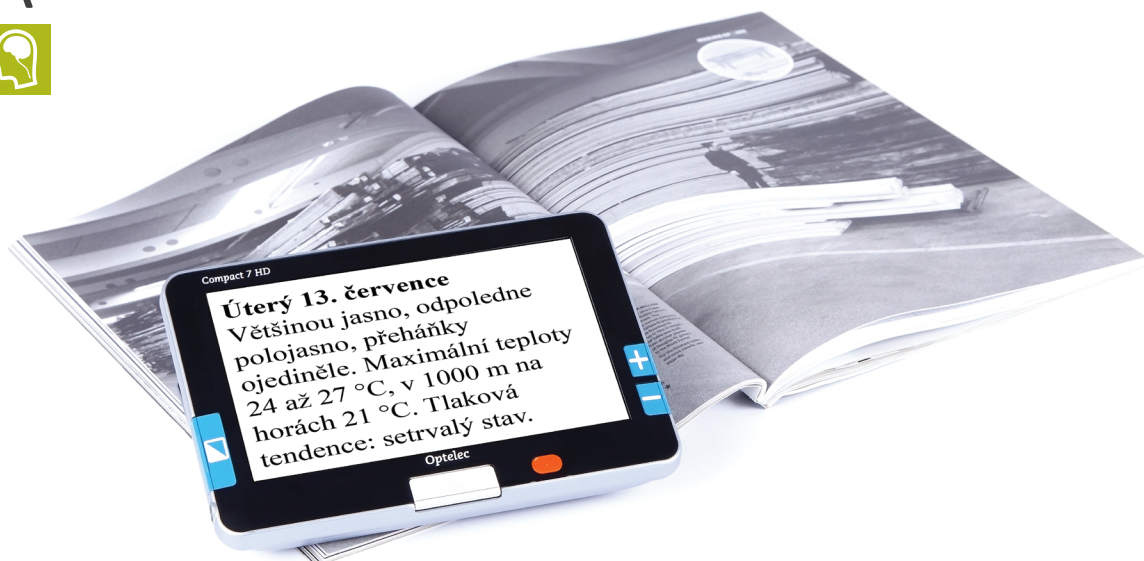

VELIKOST OBRAZOVKY 7"



MAXIMÁLNÍ ZVĚTŠENÍ 24×



POHODLNÉ ČTENÍ

obrazovka nakloněná ke čtenáři

TECHNICKÁ **PODPORA**

Technickou podporu a pomoc se zakoupením pomůcky vám poskytuje Spektra v.d.n.

KONTAKTUJTE NÁS



241 763 416



info@spektra.eu



Tlačítko je třeba přidržet asi 1 vteřinu.
(Tlačítko není nutné používat, lupa se
automaticky zapne/vypne při rozložení
a složení.)

Lupa se při čtení používá v rozloženém stavu (vyklopená na stojánku).

JAK LUPU ROZLOŽÍTE:

Stisknete bílé tlačítko pod obrazovkou uprostřed.
Obrazovka se vyklopí a lupa se zapne.

JAK LUPU SLOŽÍTE:

Monitor lupy jemně sklopíte směrem od sebe.
Lupa se po složení vypne.