



## **CLEARVIEW C S HLASEM**

### **STOLNÍ LUPA S HLASEM PRO POHODLNÉ DELŠÍ ČTENÍ**



#### **ZVĚTŠOVÁNÍ**

Velikost obrazovky 24", pohyblivý čtecí stolek



#### **HLASOVÝ VÝSTUP OVLÁDANÝ DOTYKEM**

Obrazovka je dotyková a lze si snadno vybrat oblast čtení



#### **PSANÍ**

Pod lupou je prostor pro psaní nebo ruční práce

#### TECHNICKÁ **PODPORA**

Technickou podporu a pomoc se zakoupením pomůcky vám poskytuje Spektra v.d.n.

#### KONTAKTUJTE NÁS



**241 763 416**




**info@spektra.eu**

## ZVĚTŠOVÁNÍ



## HLASOVÝ VÝSTUP

- Hlasový výstup aktivujete tak, že se prstem dotknete obrazovky v pravém dolním rohu, poté postupujte podle pokynů. Na monitoru se zobrazí tlačítka, která se ovládají dotykem.

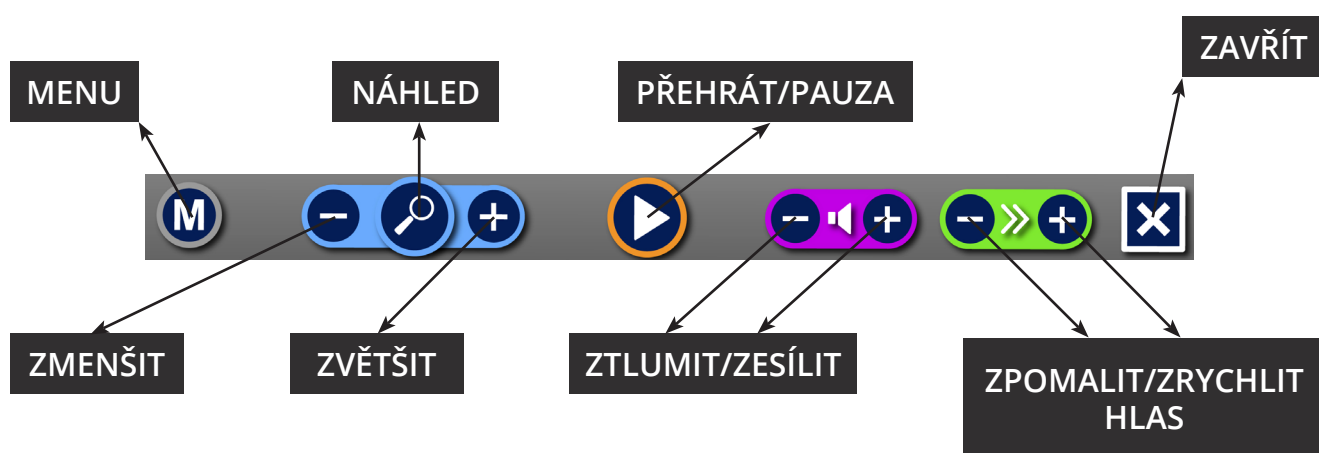

- Hlasový modul začne automaticky číst a v náhledu textu na obrazovce se vyznačí čtené zóny (číslovanými kroužky). Jestliže se prstem dotknete kroužku, spustíte čtení příslušné zóny.