

SPEKTRA



TRAVELLER HD

PŘENOSNÁ LUPA PRO POHODLNÉ DELŠÍ ČTENÍ



ZVĚTŠOVÁNÍ

Velká obrazovka o velikosti 13"



PŘENOSNOST

Lupu lze snadno složit a přenést



POHODLNÉ ČTENÍ

Obrazovka je pohyblivá a sleduje čtený řádek

TECHNICKÁ **PODPORA**

Technickou podporu a pomoc se zakoupením pomůcky vám poskytuje Spektra v.d.n.

KONTAKTUJTE NÁS




241 763 416




info@spektra.eu

ROZLOŽENÍ LUPY

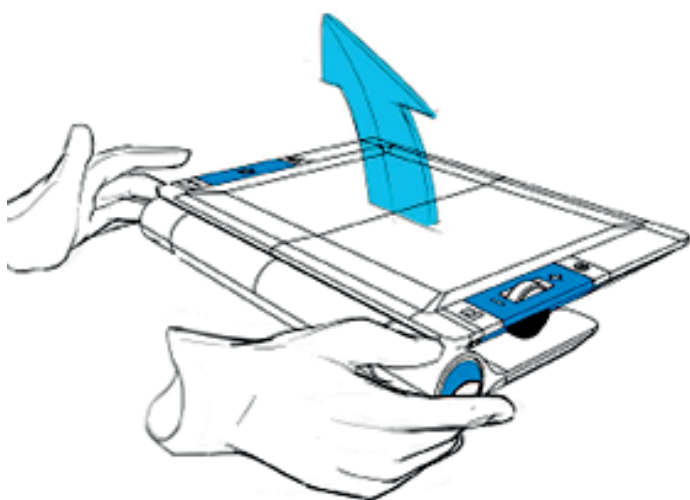

Stiskněte obě modrá tlačítka po stranách válce.

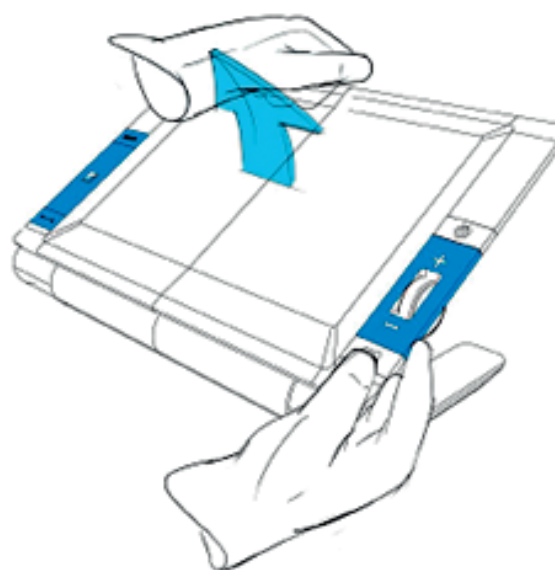

Uchopte horní část monitoru rukou a přitáhněte směrem k sobě.

SLOŽENÍ LUPY

- Lupu složíte tak, že monitor umístíte do středové polohy, stisknete obě modrá tlačítka po stranách válce a monitor jemně sklopíte směrem od sebe. Obrazovka se uzamkne.

OVLÁDÁNÍ LUPY

