



## VIEWdio PLUS



zvětšuje a předčítá papírové dokumenty

- Snadné prohlížení a čtení papírových dokumentů, knih a časopisů
- Digitalizace dokumentů pomocí skeneru nebo kamery
- Rozpozná text a přečte jej hlasovým výstupem (OCR)
- Upravitelný vzhled obrazovky i rychlost hlasového čtení

### Technická a zákaznická podpora

Spektra v.d.n. poskytuje technickou podporu i pomoc se zakoupením pomůcky  
Výukové materiály na [spektra.eu/vyuka](http://spektra.eu/vyuka)

### Kontakt

 241 763 416  
 [info@spektra.eu](mailto:info@spektra.eu)

## Spustit a ukončit Viewdio

- **Spustit:** Zástupcem na ploše nebo přes menu Start (po klávese WIN)
- **Ukončit:** Z menu Soubor > Ukončit, zkratkou ALT+F4 či křížkem „X“ vpravo nahoře

## Práce s programem

### Skenovat a vzhled skenu

- Skenovat barevně CTRL + F11
- Přepnout režim obarvování (z numerického bloku) num 5
- Změnit barvu písma a pozadí (cyklicky po num 5) F4 nebo F5 zpátky
- Zvětšit obraz (z numerického bloku) CTRL + num PLUS
- Zmenšit obraz (z numerického bloku) CTRL + num MINUS
- Přepnout na celou obrazovku či zpět ALT + ENTER, 2x levý klik
- Myš: Držet a táhnout dokument Držet levé tl. a táhnout
- Myš: Dokument sleduje myš 2x pravý klik (ESC vypne)

### Rozpoznat text, předčítání a vzhled textu

- Skenovat a rozpoznat text CTRL + F12
- Plynulé čtení od kurzoru (přehrát) F8 nebo F12
- Ukončit plynulé čtení (zastavit) CTRL nebo ESC
- Zesílit hlas CTRL + F6
- Ztlumit hlas CTRL + SHIFT + F6
- Zrychlit hlas CTRL + F7
- Zpomalit hlas CTRL + SHIFT + F7
- Zvětšit písmo (z numerického bloku) CTRL + num PLUS
- Zmenšit písmo (z numerického bloku) CTRL + num MINUS
- Změnit barvu písma a pozadí (cyklicky) F4 nebo F5 zpátky

## Návody a výukové materiály

- Návody na <https://spektra.eu/viewdio/>, výuka na <https://spektra.eu/vyuka>