



ZOOMtext



SLABOZRACÍ OVLÁDAJÍ POČÍTAČ

- Zvětšování obrazovky, filtrace barev, zvýrazněné kurzory
- Vyhlazované zvětšené písmo
- Hlasový výstup, odečítání obrazovky, čtení textu
- Upravitelný vzhled obrazovky i rychlost hlasového čtení

Technická a zákaznická podpora

Spektra v.d.n. poskytuje technickou podporu i pomoc se zakoupením pomůcky
Výukové materiály na spektra.eu/vyuka

Kontakt

 241 763 416
 info@spektra.eu

Spustit a ukončit ZoomText (ZT)

1. **Spustit:** Zástupcem ZT na ploše nebo přes menu Start (klávesa WIN)
2. **Ukončit:** V rozhraní ZT tlačítkem ZoomText > Ukončit či ALT+F4 či křížkem „Zavřít“

Práce se ZoomTextem (ZT)

Zvětšování a zvýrazňování

- Zvětšení: Volbou velikosti zvětšení v seznamu v uživatelském rozhraní ZT nebo zkratkou CapsLock + šipka nahoru / dolů
- Volba způsobu zvětšení (zoom okna): V uživatelském rozhraní ZT na kartě Zvětšovač ve skupině „Zoom okna“ vpravo dole rozbalit dialog Nastavení > karta Okno a vybrat v seznamu „Typ zobrazení“
- Zvýraznit barvy, ukazatel myši, psací kurzor, fokus: Odpovídajícími nástroji na kartě Zvětšovač ve skupině „Zvýraznění“ (při každém nástroji se rozbalí popisek)

Čtení dokumentů

- Čtení v aplikačním zobrazení (AppReader) zkratkou CapsLock+ALT+A, pozastavit a pokračovat klávesou ENTER (pauza a přehrát); ukončit čtení klávesou ESC
- Čtení v textovém zobrazení (TextReader) zkratkou CapsLock+ALT+T, pozastavit a pokračovat klávesou ENTER (pauza a přehrát); ukončit čtení klávesou ESC

Důležité klávesové zkratky

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ▪ Aktivovat / deaktivovat ZT | CapsLock + Ctrl + Enter |
| ▪ Uživatelské rozhraní | CapsLock + Ctrl + U |
| ▪ Zvětšit / Zmenšit | CapsLock + šipka nahoru / dolů |
| ▪ Vypnout / Zapnout zvětšení | CapsLock + Enter |
| ▪ Spustit čtení (App/Text Reader) | CapsLock + Alt + A / CapsLock + Alt + T |
| ▪ Zrychlit / Zpomalit řeč | CapsLock + Alt + šipka nahoru/dolů |
| ▪ Zapnout / Vypnout hlas | CapsLock + Alt + Enter |
| ▪ Umlčet | CTRL |

Pozn.: CapsLock je vyhrazená klávesa ZoomTextu; původní funkci psaní velkých písmen jí vrátíte rychlým dvojným stiskem a stejným způsobem pak zase vyhradíte pro ZoomText.