

RIVO 2

speciální klávesnice k systému iOS / Android

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© Mobience, verze 09/2018
(T) Spektra, 2019

Obsah

1. Vzhled	2
2. Orientace a názvy tlačítek	2
3. Způsob zápisu příkazů.....	2
4. Nabíjení baterie	3
5. Nastavení odečítače VoiceOver pro iPhone	3
6. Nastavení odečítače TalkBack pro Android	3
7. Nastavení hlasového asistenta v Androidu	3
8. Režim klávesnice, režim zvuku	3
9. Vypnutí a zapnutí, uzamčení, stav	4
10. Párování Bluetooth, připojení, zařízení	4
11. Nastavení režimu odečítače obrazovky podle OS zařízení	5
12. Nastavení rychlé navigace v iPhone	5
13. Navigační režim a zkratky pro VoiceOver v iPhone	5
14. Navigační režim a zkratky pro TalkBack v Androidu	7
15. Navigační režim a zkratky pro hlasového asistenta v Androidu	7
16. Zkratky pro média a režim média	8
17. Režim telefonu.....	9
18. Zkratky pro telefonování	9
19. Nastavení klávesnic	10
20. Synchronizace klávesnic	11
21. Psaní textu	11
22. Úprava textu	12
23. Svislá orientace.....	13
Dodatek 1. Jazyková nastavení pro češtinu.....	13
Dodatek 2. Rozložení Mobience QWERTY.....	14
Dodatek 3. Rozložení ABC.....	14
Dodatek 4. Běžné symboly	14
Dodatek 5. Psaní diakritických znaků a dalších symbolů	15
Dodatek 6. Pomoc s možnými problémy.....	15

1. Vzhled

- Rozměry/hmotnost klávesnice: šířka 94 mm, výška 52 mm, tloušťka 12 mm a hmotnost 55 g.
- Na přední straně je 20 tlačítek uspořádaných do 4 řad a 5 sloupců. Na tlačítku 5 se uprostřed nachází drobný vystouplý bod.
- Mikrofon se nachází na levém okraji za třemi malými otvory, které jsou uspořádány svisle.
- Reproduktor se nachází na pravém okraji za svislým žlábkem.
- Na horní straně se nacházejí tři malá tlačítka; nalevo je vypínací tlačítko, na pravé straně (zleva doprava) jsou tlačítka Klávesnice a Zvuk.
- Na spodní straně se nacházejí otvory pro odnímatelné poutko a dále (zleva doprava) zdířka pro port Mikro USB, reset v podobě špendlíkové dírky a zdířka pro sluchátka.

2. Orientace a názvy tlačítek

Rivo lze používat ve vodorovné nebo svislé poloze (orientaci) v závislosti na nastavení. Vodorovná orientace je výchozí, a i když změníte nastavení Riva na svislou orientaci, při opětovném zapnutí se nastaví zpět do vodorovné. Port USB směřuje ve vodorovné orientaci dolů, ve svislé orientaci směřuje doprava. Celá tato příručka předpokládá, že Rivo je používáno ve vodorovné orientaci, s výjimkou části 23, která se podrobně zabývá svislou orientací.

Ve vodorovné orientaci jsou tlačítka uspořádána ve 4 řadách a 5 sloupcích. Tlačítka ve sloupci zcela vlevo jsou L1, L2, L3 a L4 (shora dolů). Tlačítka ve sloupci zcela vpravo jsou R1, R2, R3 a R4. Tlačítka ve třech prostředních sloupcích jsou tlačítka B1 až B9, B*, B0 a B# a jsou uspořádána stejně jako klávesnice telefonu. Tlačítka na horní straně jsou (zleva doprava) Vypínač, Klávesnice a Zvuk, která odpovídají tlačítkům Vypínač, Klávesnice a Zvuk. Mikrofon je umístěn na přední straně vlevo od tlačítek L2 a L3, reproduktor vpravo od R2 a R3. Vypínač je na horní straně nad L1, tlačítko Klávesnice nad B3, a Zvuk nad R1. Port USB je na spodní straně pod B0 a zdířka pro sluchátka pod B# a R4.

Ve svislé orientaci jsou tlačítka uspořádána v 5 řadách a 4 sloupcích. Tlačítka v horní řadě jsou zleva doprava T1, T2, T3 a T4. Tlačítka v pravém sloupci pod T4 jsou od shora dolů D1, D2, D3 a D4. Ostatní jsou tlačítka B1 až B9, B*, B0 a B# a jsou uspořádána stejně jako klávesnice telefonu. Pověšimněte si, že pouze tlačítko B5 je fyzicky stejné ve vodorovné i svislé orientaci. Reproduktor je na přední straně nad T2 a T3, mikrofon pod B0 a B#. Tlačítko Zvuk je na levé straně vedle T1, Klávesnice vedle B1 a Vypínač vedle B*. Zdířka pro sluchátka je na pravé straně vedle T4 a D1, port USB vedle D2.

3. Způsob zápisu příkazů

Abychom se v této příručce vyhnuli dlouhým opisům, označíme stisk tlačítka jeho názvem. Například tedy „B1“ je zkratka pro stisknutí tlačítka B1. Posloupnost názvů tlačítek oddělených čárkou označuje stisknutí odpovídajících tlačítek postupně za sebou. Např. „B1, B2“ je zkratka pro stisknutí tlačítka B1, následovaného stisknutím tlačítka B2. Znaménko plus za názvem tlačítka označuje současné stisknutí tlačítek. Např. „L1 + B1“ znamená podržení tlačítka L1 a přistisknutí tlačítka B1. Znaménko plus za názvem tlačítka, které je následováno řadou názvů tlačítek oddělených čárkou, označuje přidržení prvního tlačítka před znaménkem plus, postupného stisknutí dalších tlačítek podle jejich pořadí a nakonec uvolnění prvního tlačítka. Např. „L1 + B1, B2“ je zkratka pro přidržení tlačítka L1 a následně postupné stisknutí tlačítek B1 a B2 a nakonec uvolnění L1.

V případech, kdy je to jednoznačné, bude dvanáct tlačítek uprostřed označeno bez úvodního písmene B v jejich názvu. Např. „1“ znamená stisk tlačítka B1, „*“ stisk tlačítka B* a „#“ stisk tlačítka B#.

V případech, kdy je to nutné pro upřesnění, bude úvodní písmeno B změněno na H, pokud je Rivo v horizontální orientaci, a na V, pokud je Rivo ve vertikální orientaci. Např. H1 (respektive V1) je zkratka pro B1, pokud je Rivo ve vodorovné (respektive svislé) orientaci.

4. Nabíjení baterie

Rivo se nabíjí pomocí kabelu Mikro USB. Baterie je plně nabitá asi za 3 hodiny a může vydržet na jedno nabití více než 15 dnů, užívá-li se pouze klávesnice. Tento čas se zkrátí, používáte-li funkce jako „zvuk“ nebo „telefon“.

Když se Rivo zapojí do nabíječky, zavibruje a začne blikat červená LED dioda. Když je baterie plně nabitá, Rivo zavibruje a dioda se změní na zelenou.

Chcete-li zkontrolovat stav baterie, stiskněte tlačítka Vypínač + Klávesnice. Počet krátkých vibrací udává stav baterie v pěti úrovních - 5 vibrací značí plné nabití, 1 vibrace značí slabou baterii. Když je stav baterie příliš nízký, Rivo se automaticky vypne.

5. Nastavení odečítače VoiceOver pro iPhone

Zapněte VoiceOver na iPhonu pomocí Nastavení/Obecné/Zpřístupnění/VoiceOver. Později můžete zkusit upravit nastavení VoiceOveru. Zvolíte-li možnost VoiceOver na panelu

Nastavení/Obecné/ Zpřístupnění / Zkratka zpřístupnění,

lze VoiceOver zapnout nebo vypnout pouhým rychlým trojím stisknutím tlačítka plochy na iPhonu.

6. Nastavení odečítače TalkBack pro Android

Chcete-li používat TalkBack, nainstalujte aplikaci „Android Accessibility Suite“ z obchodu Google Play. Zapněte odečítač TalkBack v nabídce Nastavení/Přístupnost/TalkBack. Později můžete zkusit upravit nastavení TalkBack v Nastavení/Přístupnost/TalkBack/Nastavení. Ujistěte se, že v

Nastavení/Přístupnost/TalkBack/Nastavení/Klávesové zkratky/Vybrat mapování kláves

je vybráno „výchozí mapování kláves“.

7. Nastavení hlasového asistenta v Androidu

„Hlasový asistent“ je čtečka obrazovky, která je k dispozici v posledních smartphonech od Samsung Galaxy. Zapněte funkci hlasový asistent v nabídce Nastavení/Usnadnění/Zrak/Voice Assistant (Hlasový asistent). Později můžete zkusit upravit nastavení hlasového asistenta v

Nastavení/Usnadnění/Zrak/Voice Assistant (Hlasový asistent)/Nastavení

Ujistěte se, že v

Nastavení/Usnadnění/Zrak/Voice Assistant/Nastavení/Klávesové zkratky/ Mapování kláves

je vybráno „výchozí mapování kláves“.

8. Režim klávesnice, režim zvuku

Chcete-li při používání Riva slyšet zvuk z reproduktoru zařízení, stiskněte tlačítko Klávesnice. Tím se Rivo s krátkým zavibrováním přepne do režimu klávesnice. Pokud nedojde k zavibrování, znamená to, že Rivo bylo uzamčeno. V tom případě stiskněte tlačítka Klávesnice + Vypínač.

Chcete-li při používání Riva slyšet zvuk z reproduktoru Riva, stiskněte tlačítko Zvuk. Tím se Rivo s krátkým zavibrováním přepne do režimu zvuku. Pokud nedojde k zavibrování, znamená to, že Rivo bylo uzamčeno. V tom případě stiskněte tlačítka Zvuk + Vypínač.

Po připojení k zařízení se Rivo vždy spouští v režimu klávesnice. Pokud dojde k tomu, že – poté, co jste nastavili Rivo do režimu klávesnice – uslyšíte zvuk z reproduktoru Riva, znamená to, že Rivo bylo automaticky přenastaveno do režimu zvuku na základě požadavku zařízení. V tom případě stiskněte L3 + L1, 7, 4, 5. Tímto pro příště odmítnete, aby se Rivo přepnulo do režimu zvuku na základě požadavku zařízení. Pokud chcete toto nastavení zrušit, stiskněte L3 + L1, 7, 4, 4.

9. Vypnutí a zapnutí, uzamčení, stav

Pokud podržíte vypínací tlačítko až do zaznění vibrací, Rivo se zapne nebo vypne. Při zapnutí se ozve jedna dlouhá vibrace a při vypnutí vibrace dvě. Pokud podržíte stisknuté tlačítko Klávesnice do doby, než dojde ke dvěma krátkým vibracím, Rivo se odpojí od připojeného zařízení a dojde k uzamčení (zablokování) tlačítek.

Stisknete-li tlačítka Klávesnice + Vypínač, ozve se krátká vibrace. Rivo se opět připojí k zařízení v režimu klávesnice a dojde k odemčení (odblokování) tlačítek. Přidržíte-li tlačítko Zvuk do doby, než dojde ke krátké vibraci, Rivo se přepne do režimu zvuku a dojde k uzamčení tlačítek. Stisknete-li tlačítka Zvuk + Vypínač, ozve se krátká vibrace. Rivo se přepne do režimu zvuku a dojde k odemčení tlačítek.

Stisknete-li krátce tlačítko Vypínač, ozvou se v závislosti na aktuálním stavu Riva jedna, dvě nebo tři krátké vibrace. Pokud se ozve jedna vibrace, značí to buď režim klávesnice nebo zvuku. Ozvou-li se dvě vibrace, Rivo je odpojeno a tlačítka jsou uzamčena. Ozvou-li se tři vibrace, znamená to, že tlačítka jsou uzamčena v režimu zvuku.

Pokud stisknete tlačítka Vypínač + Zvuk nebo stisknete současně tlačítka Klávesnice a Zvuk, Rivo se odemkne a přepne do režimu telefonu.

10. Párování Bluetooth, připojení, zařízení

Zapněte Bluetooth na zařízení. Pro párování se zařízením musí být Rivo v režimu párování. Pokud Rivo nebylo nikdy dříve párováno, je automaticky při zapnutí nastaveno do párovacího režimu, který je indikován třemi krátkými vibracemi a blikáním modré LED diody. V opačném případě stiskněte L3 + 0, # (tím Rivo přepnete do párovacího režimu).

Po chvíli se na obrazovce zařízení objeví „Rivo“. Abyste navázali spojení, „Rivo“ na obrazovce zařízení vyberte a dvakrát na něj poklepejte. Pokud je Rivo zapnuté, automaticky se pokusí připojit k zařízení, ke kterému bylo naposledy úspěšně připojeno.

Správa zařízení Bluetooth se v Rivo provádí pomocí L3 + 0 dále uvedeným způsobem:

Akce	Klávesová kombinace
Uložit aktuální zařízení pod určitým číslem, kde dané číslo může být v rozsahu 1 až 6 (Např. L3 + 0, 1, R3 uloží aktuální zařízení jako zařízení 1)	L3 + 0, dané číslo, R3
Odstranit zařízení označené určitým číslem a uložené v Rivu (Např. L3 + 0, 1, R1 odebere zařízení 1)	L3 + 0, dané číslo, R1
Odpojit zařízení nebo zrušit aktuální požadavek na připojení	L3 + 0, *
Připojit se k zařízení označenému určitým číslem (Např. L3 + 0, 1 připojí Rivo k zařízení 1)	Odpojíte se L3 + 0, * a pak L3 + 0, dané číslo
Opětovně připojit k poslednímu zařízení (Zařízením 0 je vždy míněno poslední zařízení v Rivo)	L3 + 0, 0
Přepnout Rivo do režimu párování (Ozvou se tři krátké vibrace a zabliká modrá dioda LED)	L3 + 0, #

V Rivo nelze uložit žádná duplicitní zařízení. To znamená, že pokud jako jiné zařízení znovu uložíte zařízení, které již bylo dříve uloženo, bude toto zařízení uloženo pouze jako nové zařízení.

Veškeré změny v nastavení Riva jsou automaticky ukládány spolu s informacemi o připojení k zařízení.

11. Nastavení režimu odečítače obrazovky podle OS zařízení

Rivo je ve výchozím nastavení v režimu VoiceOver (iOS) a pamatuje si poslední nastavení režimu odečítače obrazovky.

Akce	Klávesová kombinace
Nastavit Rivo do režimu TalkBack (Android)	L3 + L1, 3, 4, 2
Nastavit Rivo do režimu hlasového asistenta Android	L3 + L1, 3, 4, 5
Nastavit Rivo do režimu VoiceOver (iOS)	L3 + L1, 3, 6

Po připojení k zařízení, které bylo uloženo, je Rivo automaticky nastaveno na posledně užitý režim odečítače obrazovky na zařízení.

12. Nastavení rychlé navigace v iPhoneu

Má-li Rivo být plně funkční, je třeba v iPhoneu zapnout rychlou navigaci. Pokud je rychlá navigace vypnutá, některé příkazy nemusejí být dostupné. Chcete-li změnit nastavení rychlé navigace, stiskněte R1 + 1. Pokud aktivujete textové pole stisknutím tlačítka 5 a začnete psát text, iPhone rychlou navigaci vypne. Když ale textové pole opustíte, iPhone rychlou navigaci opět automaticky zapne.

13. Navigační režim a zkratky pro VoiceOver v iPhoneu

Akce	Klávesová kombinace
Zapnout navigační režim klávesnice Rivo – to je výchozí režim po zapnutí klávesnice	R4
Předchozí nebo další položka na obrazovce	4 nebo 6
Předchozí nebo další kontejner	L1 + 4 nebo L1 + 6
První nebo poslední položka na obrazovce	1 nebo 7
Rolovat stránku nahoru nebo dolů	3 nebo 9
Rolovat stránku vlevo nebo vpravo	L2 nebo R2
Aktivovat aktuální položku	5
Vynutit aktivaci aktuální položky	L1 + 5
Aktivovat tlačítko Home na iPhoneu	0
Aktivovat Siri (pak bude Siri aktivována při zaznění zvukového signálu)	0 držená 1 sec nebo R1 + 3 v režimu zvuku
Přepínat mezi mikrofonom sluchátek a mikrofonom Rivo v Siri (Rivo zavibruje, když je zvolen jeho mikrofon)	* + L3
Deaktivovat Siri	0 krátce
Otevřít přepínač aplikací	0 dvakrát rychle po sobě
Zavřít aplikaci z přepínače aplikací – vyberte tu, kterou chcete zavřít	9
Zavřít přepínač aplikací (iPhone se navrátí do předchozí aplikace, pokud ta již nebyla uzavřena; v opačném případě se iPhone vrátí na domovskou obrazovku)	0
Spustit nebo zastavit VoiceOver (musíte předtím funkci zapnout v nastavení VoiceOveru: Nastavení / Obecné / Zpřístupnění / Zkratka zpřístupnění)	0 třikrát rychle po sobě

Akce	Klávesová kombinace
Další nebo předchozí rotor	# nebo L1 + # Pro pohyb zpět lze stisknout * místo L1 + # hned po stisku #
Zvýšit nebo snížit hodnotu aktuálního rotoru – vybrat předchozí nebo následující hodnotu aktuálního rotoru	2 nebo 8
Vrátit se o nabídku zpět nebo zavřít vyskakovací okno	*
Přečíst stavový řádek	L1, pro další navigaci pak 4 nebo 6
Opustit stavový řádek a vrátit se na místo, kde jste byli předtím	L1
Otevřít oznamovací centrum	L1, 3
Otevřít ovládací centrum	L1, 9
Zavřít oznamovací centrum nebo ovládací centrum	*
Číst položky postupně počínaje aktuální	R1
Pozastavit nebo obnovit čtení položek	R3 nebo L1 + R3
Vyhledávat v iPhonu	L1 + 3 do text.pole hledání Spotlight nebo 3 na domovské obr.
Zamknout nebo odemknout obrazovku	L1 + R4
Spustit nebo pozastavit aktuální médium (při přehrávání hudby nebo videa se přehrává nebo pozastaví jakékoli aktuální médium)	L1 + R1, R1
Přijmout příchozí hovor z iPhonu nebo ukončit aktuální hovor (toto v případě, že při příchozím hovoru nebo při telefonním hovoru je telefonní hovor aktuálním médiem)	L1 + R1, R1
Poklepat dvakrát na aktuální položku a podržet ji	L1 + R1, 8
Otevřít výběr položek aktuální obrazovky	L1 + R1, 6
Upravit popisek aktuální položky (Pokud popisek zcela odstraníte, bude obnoven výchozí popisek položky.)	L1 + R1, 1
Hledat na aktuální obrazovce (Přepněte Rivo do režimu zadávání textu a zadejte hledaný text. Po zadání textu nezapomeňte stisknout klávesu R3 a ENTER následovaný R4, tím se vrátíte do navigačního režimu. Pokud stisknete klávesu R4 bez zadání textu, hledání je zrušeno.)	L1 + R1, 7
Procházet výsledky vyhledávání: předchozí nebo další výsledek	L1 + 7 nebo L1 + 9
Změnit nastavení rychlé navigace	R1 + 1
Přečíst aktuální řádek	R1 + 2
Přečíst popis aktuální položky	R1 + 5
Přečíst celou položku	R1 + 8
Zapnout nebo vypnout mluvení VoiceOveru	R1 + R3
Zapnout nebo vypnout clonu obrazovky	R1 + R4
Zkopírovat do schránky naposledy vyslovenou položku	R1 + 7
Přejít na (nebo opustit) Dock iPadu	R1 + 0
Aktivovat předvolby VoiceOveru (Otevře se Nastavení / Obecné / Zpřístupnění / VoiceOver)	R1 + L1, 7
Zapnout nebo vypnout náповědu VoiceOveru	R1 + L1, * nebo *
Opustit náповědu VoiceOveru	

Povšimněte si, že navigační příkazy ve formě L1 + X nebo R1 + X jsou funkční, i když se Rivo nenachází v navigačním režimu.

14. Navigační režim a zkratky pro TalkBack v Androidu

Akce	Klávesová kombinace
Zapnout navigační režim klávesnice Rivo – to je výchozí režim po zapnutí klávesnice	R4
Vybrat levou nebo pravou položku na obrazovce	4 nebo 6
Vybrat horní nebo dolní položku na obrazovce	2 nebo 8
Vybrat první nebo poslední položku na obrazovce	1 nebo 7
Rolovat stránku vlevo nebo vpravo	L2 nebo R2
Klepnout na aktuální položku	5
Aktivovat tlačítko Home v Androidu	0
Aktivovat rozpoznávání hlasu (pak bude rozpoznávání hlasu aktivováno při zaznění zvukového signálu)	0 držená 1 sec nebo R1 + 3 v režimu zvuku
Přepínat mezi mikrofonem sluchátek a mikrofonem Rivo při rozpoznávání hlasu (Rivo zavibruje, když je zvolen jeho mikrofon)	* + L3
Deaktivovat rozpoznávání hlasu	0 krátce
Otevřít nebo zavřít seznam naposledy použitých aplikací	R4 + 0
Vybrat aplikaci v seznamu naposledy použitých: předchozí nebo další	R4 + 2 nebo R4 + 8
Zavřít aplikaci v seznamu naposledy použitých aplikací - vyberte aplikaci, kterou chcete zavřít	R4 + 6, 5
Vrátit se do předchozí nabídky nebo zavřít vyskakovací okno	*
Přecházet mezi stavovým řádkem, navigačním panelem a hlavním oknem	L1
Otevřít oznamovací centrum a menu rychlého nastavení	L1 + 3
Zavřít oznamovací centrum a menu rychlého nastavení	*
Číst položky postupně počínaje následující	R1
Zastavit čtení položek	R3 nebo L1 + R3
Zamknout nebo odemknout obrazovku	L1 + R4
Dvakrát poklepat na aktuální položku a podržet ji	L1 + 5
Přečíst předchozí nebo následující znak	L1 + 4 nebo L1 + 6
Přečíst předchozí nebo následující slovo	L1 + L2 nebo L1 + R2
Otevřít globální kontextové menu	#
Pozastavit nebo obnovit TalkBack	R1 + R3

Povšimněte si, že navigační příkazy ve formě L1 + X nebo R1 + X jsou funkční, i když se Rivo nenachází v navigačním režimu.

Jako volitelné ovládání Androidu podporuje Rivo tyto uvedené způsoby: přidržte R4, pak L1 pro TAB, L2 pro BACKTAB, 2 pro nahoru, 8 pro dolů, 4 pro vlevo, 6 pro vpravo, 5 pro Enter, 1 pro Home, 7 pro End, 3 pro stránku nahoru, 9 pro stránku dolů, R1 pro Backspace, R3 pro Enter, # pro mezeru a * pro ESC.

15. Navigační režim a zkratky pro hlasového asistenta v Androidu

Akce	Klávesová kombinace
Zapnout navigační režim klávesnice Rivo – to je výchozí režim po zapnutí klávesnice	R4
Vybrat levou nebo pravou položku na obrazovce	4 nebo 6
Vybrat horní nebo dolní položku na obrazovce	2 nebo 8
Vybrat první nebo poslední položku na obrazovce	1 nebo 7
Rolovat stránku vlevo nebo vpravo	L2 nebo R2
Klepnout na aktuální položku	5
Aktivovat tlačítko Home v Androidu	0
Aktivovat rozpoznávání hlasu (pak bude rozpoznávání hlasu aktivováno při zaznění zvukového signálu)	0 držená 1 sec nebo R1 + 3 v režimu zvuku

Akce	Klávesová kombinace
Přepínat mezi mikrofonom sluchátek a mikrofonom Rivo při rozpoznávání hlasu (Rivo zavibruje, když je zvolen jeho mikrofon)	* + L3
Deaktivovat rozpoznávání hlasu	0 krátce
Otevřít nebo zavřít seznam naposledy použitých aplikací	R4 + 0
Vybrat aplikaci v seznamu naposledy použitých: předchozí nebo další	R4 + 2 nebo R4 + 8
Zavřít aplikaci v seznamu naposledy použitých aplikací - vyberte aplikaci, kterou chcete zavřít	R4 + 6, 5
Vrátit se do předchozí nabídky nebo zavřít vyskakovací okno	*
Přecházet mezi stavovým řádkem, navigačním panelem a hlavním oknem	L1
Otevřít oznamovací centrum a menu rychlého nastavení	L1 + 3
Zavřít oznamovací centrum a menu rychlého nastavení	*
Číst položky postupně počínaje následující	R1
Zastavit čtení položek	R3 nebo L1 + R3
Zamknout nebo odemknout obrazovku	L1 + R4
Dvakrát poklepat na aktuální položku a podržet ji	L1 + 5
Vybrat další položku rychlého menu	#, po stisku # na předchozí položku *
Změnit hodnotu aktuální položky rychlého menu	3 nebo 9

Povšimněte si, že navigační příkazy ve formě L1 + X nebo R1 + X jsou funkční, i když se Rivo nenachází v navigačním režimu.

Jako volitelné ovládání Androidu podporuje Rivo tyto uvedené způsoby: přidržte R4, pak L1 pro TAB, L2 pro BACKTAB, 2 pro nahoru, 8 pro dolů, 4 pro vlevo, 6 pro vpravo, 5 pro Enter, 1 pro Home, 7 pro End, 3 pro stránku nahoru, 9 pro stránku dolů, R1 pro Backspace, R3 pro Enter, # pro mezeru a * pro ESC.

16. Zkratky pro média a režim média

Akce	Klávesová kombinace
Přehrát nebo pozastavit hudbu	* + 5
Zvýšit nebo snížit hlasitost zvuku	* + 2 nebo * + 8
Zvýšit nebo snížit hlasitost zvuku v připojených sluchátkách (Tím změníte jen hlasitosti sluchátek připojených k Rivo, nikoli hlasitost zařízení)	* + # nebo * + 0
Přehrát nebo pozastavit hudbu	* + 5
Zvýšit nebo snížit hlasitost zvuku	* + 2 nebo * + 8
Zcela ztlumit zvuk	* + 9
Přejít na předchozí nebo další skladbu	* + 4 nebo * + 6
Přetočit skladbu dozadu nebo dopředu	* + 4 nebo * + 6 a podržet
Nastavit Rivo do režimu média (V režimu média nemusíte ve výše uvedených zkratkách pro média přidržet tlačítko *)	L3 + *

17. Režim telefonu

Akce	Klávesová kombinace
Přepnout Rivo do režimu telefonu (V režimu telefonu je Rivo funkční pouze ve svislé orientaci, která je nastavena automaticky)	Vypínač + Zvuk nebo současně tlačítka Klávesnice a Zvuk
Přijmout první příchozí hovor	T1
Přijmout druhý příchozí hovor	T1
Přepínat mezi prvním a druhým hovorem	T1
Ukončit aktuální hovor	T4
Ukončit první hovor a přijmout druhý příchozí hovor	T4
Odmítnout první příchozí hovor	T4
Odmítnout druhý příchozí hovor	D4 + T4
Volat pomocí DTMF tónových předvoleb (číselná tlačítka během hovoru)	Stisky příslušných čísel
Zadat ručně telefonní číslo (tisknete odpovídající číselná tlačítka, maximální délka telefonního čísla je 20 číslic)	Stisky příslušných čísel
Odstranit poslední zadanou číslici	T4
Vymazat celé zadané číslo	D4 + T4
Vytočit zadané telefonní číslo (zadejte číslo stisky příslušných číslic)	T1
Vytočit poslední odchozí hovor	T1
Přepnout na hlasitý hovor (když se hlasitý hovor zapne, Rivo zavibruje)	T2
Zcela ztlumit mikrofon během hovoru (když se mikrofon ztlumí, Rivo zavibruje)	T3
Přenášet zvuk mezi Rivem a smartphonem během telefonního hovoru	D3 + 0
Zvýšit nebo snížit hlasitost související s hovorem v režimu telefonu (Lze tak ovládat hlasitost hovoru, vyzváněcího tónu, tónu zpětného vyzvánění a sluchátek)	D1 nebo D2
Nastavit Rivo tak, aby při příchozím hovoru vibrovalo a přehrало vyzváněcí tón	D3 + D4
Nastavit Rivo tak, aby při příchozím hovoru přehrало vyzváněcí tón	D3 + D4, D4
Zcela ztlumit vyzváněcí tón nebo vibrace	D3 + 4 nebo D3 + 6
Přepnout Rivo do režimu zvuku (chcete-li smartphone během telefonního hovoru používat se čtečkou obrazovky)	Zvuk
Přepnout mezi mikrofonem sluchátek a Riva (je-li vybrán mikrofon Riva, Rivo zavibruje)	D3 + #

18. Zkratky pro telefonování

Zkratky pro telefonování používají stejná tlačítka v kombinaci s * bez ohledu na aktuální režim a orientaci.

Akce	Klávesová kombinace
Přijmout první příchozí hovor (toto je funkční i v případě, kdy jsou tlačítka uzamčena, ale stav uzamčení je zachován)	* + R1
Přijmout druhý příchozí hovor	* + R1
Přepínat mezi prvním a druhým hovorem	* + R1
Ukončit aktuální hovor (toto je funkční i v případě, kdy jsou tlačítka uzamčena, ale stav uzamčení je zachován)	* + R4
Ukončit první hovor a přijmout druhý příchozí hovor (toto je funkční i v případě, kdy jsou tlačítka uzamčena, ale stav uzamčení je zachován)	* + R4
Odmítnout první příchozí hovor (toto je funkční i v případě, kdy jsou tlačítka uzamčena, ale stav uzamčení je zachován)	* + R4
Přepnout na hlasitý hovor (když se hlasitý hovor zapne, Rivo zavibruje)	* + R2

Akce	Klávesová kombinace
Zcela ztlumit mikrofon během hovoru (když se mikrofon ztlumí, Rivo zavibruje)	* + R3
Přenášet zvuk mezi Rivem a smartphonem během telefonního hovoru	* + L2
Zvýšit nebo snížit hlasitost související s hovorem v režimu telefonu (Lze tak ovládat hlasitost hovoru, vyzváněcího tónu, tónu zpětného vyzvánění a sluchátek)	* + # nebo * + 0
Nastavit Rivo tak, aby při příchozím hovoru vibrovalo a přehrало vyzváněcí tón	* + L4
Nastavit Rivo tak, aby při příchozím hovoru přehrало vyzváněcí tón	* + L4, L4
Zcela ztlumit vyzváněcí tón nebo vibrace	* + 2 nebo * + 8
Přepnout Rivo do režimu telefonu	Vypínač + Zvuk nebo současně tlačítka Klávesnice a Zvuk

19. Nastavení klávesnic

V Rivu lze nastavit až dva jazyky; jeden povinný jazyk pomocí L3 a další volitelný jazyk pomocí L4.

Na iPhoneu vyžaduje Rivo příslušné klávesnice v

Nastavení/Obecné/Klávesnice/Klávesnice,

stejně jako odpovídající hardwarovou klávesnici pro každou z klávesnic v

Nastavení/Obecné/Klávesnice/Hardwarová klávesnice.

V Androidu je třeba výchozí klávesnici změnit na klávesnici Google, Gboard. V obchodu Google Play vyhledejte a nainstalujte aplikaci „Gboard-Google Keyboard“ a přejděte do

Nastavení/System/Jazyk a vstup.

Pak nastavte Gboard jako aktivní ve Virtuální klávesnice v sekci Klávesnice a zadávání a nastavte Gboard jako výchozí klávesnici ve Výchozí klávesnice.

Povinný jazyk, přiřazený tlačítku L3, může být libovolný jazyk s římskou abecedou. Angličtina je přednastavena ve výchozím, továrním nastavení. V současné době je v systému Android podporována pouze angličtina. Chcete-li nastavit jazyk pro L3, stiskněte L3 + L1, 6, následované stisknutím kódu jazyka. Například kód češtiny je 7 7. Chcete-li nastavit Rivo do režimu psaní v jazyce pro L3, stiskněte L3.

Volitelný jazyk, přiřazený tlačítku L4, může být libovolný jazyk. Počáteční tovární nastavení je „žádný“. V současné době je v systému Android podporována pouze korejšťina. Chcete-li nastavit jazyk pro L4, stiskněte L3 + L1, L4, 6, následované stisknutím kódu jazyka. Chcete-li zrušit jazyk pro L4, stiskněte L3 + L1, L4, R1. Chcete-li nastavit Rivo do režimu psaní v jazyce pro L4, když máte nastavený jazyk pro L4, stiskněte L4. Povšimněte si, že pokud pro L4 není jazyk nastaven, Rivo se stisknutím L4 nastavuje do režimu zadávání čísel; jinak se Rivo nastavuje do režimu zadávání čísel stisknutím L4 + R4.

Rozložení písmen a typizace české diakritiky jsou popsány v dodatku a jazyková dokumentace pro Rivo obsahuje veškeré informace o podporovaných jazycích a potřebných nastaveních.

Momentálně podporované jazyky pro iPhone jsou následující: angličtina, arabština, britská angličtina, bulharština, čeština, dánština, finština, francouzština, hebrejšťina, holandština, islandština, italština,

japonština, katalánština, korejština, maďarština, němčina, norština, polština, portugalština, rumunština, ruština, řečtina, srbština, španělština, švédština, turečtina, ukrajinština, vlámština.

Momentálně podporované jazyky pro Android jsou následující: angličtina, korejština.

20. Synchronizace klávesnic

Při psaní textu se ujistěte, že aktuální jazyk telefonu je stejný jako aktuální jazyk Riva. Přepínání mezi výstupy klávesnice na smartphonu lze provést opakovaným stisknutím L3 nebo L4. To znamená, že pokud nastavíte Rivo do režimu psaní v jazyce pro L3 nebo L4, ale zadaná písmena nejsou dle očekávání, přepněte aktuální klávesnici smartphonu na tu, která odpovídá aktuálnímu jazyku Riva, a to opakovaným tisknutím L3 nebo L4, dokud na smartphonu nevyberete správnou klávesnici.

21. Psaní textu

Chcete-li psát do textového pole v iPhonu, pole musí být nejprve aktivováno. Chcete-li textové pole aktivovat, zvolte jej a stiskněte 5. Upozorňujeme, že rychlá navigace je dočasně vypnutá, ale zapne se automaticky, jakmile kurzor VoiceOveru opustí textové pole.

Namísto aktivace textového pole v iPhonu můžete rychlou navigaci ručně vypnout pomocí R1 + 1. V takovém případě nezapomeňte po dokončení rychlou navigaci znovu zapnout pomocí R1 + 1. V některých případech, kdy nemůžete aktuální textové pole aktivovat nebo potřebujete posunout kurzor VoiceOveru na obrazovce, abyste si pročetli obrazovku při stálém zadávání písmen do textového pole, je možné, že budete muset použít tuto alternativu. Poté však rychlou navigaci nezapomeňte znovu zapnout.

Písmena každého jazyka jsou přiřazena číselným tlačítkům, jak je popsáno v příslušném jazykovém oddílu. Písmena s háčky a čárkami se zadávají soustiskem R2 + číslo X, přičemž Rivo se nachází v režimu psaní, jak je uvedeno v odpovídajícím jazykovém oddílu. Jazyky s římskou abecedou sdílejí rozložení QWERTY Mobience a rozložení ABC. Mobience QWERTY je výchozí rozložení při psaní písmen, které lze nastavit stiskem L3 + L1, 4, 1. Abecední rozložení lze nastavit stiskem L3 + L1, 4, 2.

Důrazně doporučujeme rozložení Mobience QWERTY, protože se s ním lépe pracuje při psaní textu a je konzistentní při psaní textu s háčky a čárkami, stejně jako při psaní symbolů.

Chcete-li zadávat velká písmena, nastavte Rivo buď do režimu věty, nebo do režimu CAPS LOCK. V režimu věty je velké pouze první písmeno a v režimu Caps Lock jsou velká i všechna následující písmena. Povšimněte si, že v těchto režimech se zadávají velká písmena i s háčky a čárkami.

Akce	Klávesová kombinace
Přepnout Rivo do režimu psaní malých písmen v jazyce L3	L3
Přepnout Rivo do režimu věty v jazyce L3	R1 + L3
Přepnout Rivo do režimu CAPS LOCK v jazyce L3	R1 + L3, L3
Přepnout Rivo do režimu psaní malých písmen v jazyce L4	L4
Přepnout Rivo do režimu věty v jazyce L4	R1 + L4
Přepnout Rivo do režimu CAPS LOCK v jazyce L4	R1 + L4, L4

Povšimněte si, že některé jazyky nastavené pro L4 nemusejí rozlišovat malá a velká písmena.

Chcete-li zadat písmeno na tlačítku, kterému je přiřazeno více písmen, tiskněte tlačítko opakovaně, dokud není zadáno správné písmeno. Chcete-li zadat další písmeno přiřazené stejnému tlačítku ihned po zadání písmene, stiskněte L2 nebo R2. Chcete-li např. zadat www, stiskněte klávesy 1, 1, R2, R2, 1, 1.

Akce	Klávesová kombinace
Zadat tabulátor pro zadání znaku tabulátoru nebo pro přechod na další textové pole	L1
Zadat BACKTAB pro přechod na předchozí textové pole	R4 + L1, L1
Zadat BACKSPACE pro smazání předešlého znaku	R1
Zadat ENTER (v závislosti na konkrétní aplikaci uvozuje nový řádek)	R3
Zadat ENTER se zapnutým modifikátorem (v závislosti na konkrétní aplikaci aktivuje událost, např. odeslání zprávy)	R4 + R3
Zadat mezeru	#

Interpunkční znaménka se zadávají v režimu symbolů, podrobnosti jsou uvedeny v dodatku Běžné symboly. Chcete-li v libovolném textovém režimu nastavit Rivo do režimu symbolů, stiskněte *. Pak zadejte symbol stejně, jako když zadáváte písmeno. Povšimněte si, že symboly přiřazené na B* mohou být zadávány pomocí L2 nebo R2. Po zadání symbolu se Rivo automaticky vrátí zpět do předchozího textového režimu.

Chcete-li napsat písmeno na tomtéž tlačítku bezprostředně poté, co na něm byl zadán symbol, stiskněte L2 nebo R2. Chcete-li například zadat @i, stiskněte *, 6, L2. Mohou existovat některé další symboly v závislosti na konkrétním jazyce, jak je uvedeno v odpovídajícím jazykovém oddíle. Zadávají se ve formě *, R2 + X.

Čísla se zadávají v číselném režimu nebo pomocí klávesových zkratk. Chcete-li nastavit Rivo do číselného režimu, pokud není nastaven žádný jazyk pro L4, stiskněte L4. Chcete-li nastavit Rivo do číselného režimu v případě, kdy je pro L4 jazyk nastaven, stiskněte L4 + R4.

Čísla lze též zapsat jednodušším způsobem pomocí klávesových zkratk, přičemž můžete být v libovolném režimu (není nutné přepnutí do číselného režimu), a to přidržetím L4 a následným stisknutím číselných tlačítek. Tento způsob je vhodný pro zadávání krátkých čísel během psaní textu nebo pro zadávání hesla v navigačním režimu.

Backspace může být také zadán pomocí L4 + R1 v jakémkoli režimu a ENTER pomocí L4 + R3. Symboly * a # mohou být také zadány pomocí L4 + * a L4 + #. Chcete-li ručně zobrazit nebo skrýt klávesnici na obrazovce, stiskněte L4 + R4, R4.

22. Úprava textu

Chcete-li psát do textového pole v iPhonu, musíte pole nejprve aktivovat takto: zvolte jej a stiskněte 5. Pozor, rychlá navigace je dočasně vypnutá, ale zapne se automaticky, jakmile kurzor VoiceOveru opustí textové pole. Pak nastavte Rivo do režimu zadávání textu a můžete začít provádět úpravy.

Pamatujte, že úprava textu je možná pouze tehdy, když se Rivo nachází v režimu zadávání textu. Rychlou navigaci je v iPhonu třeba vypnout. Všechny příkazy pro editaci jsou zkratky ve formě R4 + X.

Akce	Klávesová kombinace
Pohybovat kurzorem po znacích	R4 + 4 nebo R4 + 6
Pohybovat kurzorem po slovech	R4 + L2 nebo R4 + R2
Přejít kurzorem na začátek nebo konec aktuálního řádku na obrazovce	R4 + 1 nebo R4 + 7
Pohybovat kurzorem po řádcích	R4 + 2 nebo R4 + 8
Odstranit předchozí znak	R1
Odstranit následující znak	R4 + R1
Vybrat blok textu (kurzorem na začátek bloku a podržte R4, blok vybíráte klávesou 5, na konci bloku klávesu R4 uvolníte)	R4, výběr pomocí 5
Vybrat veškerý text v aktuálním textovém poli	R4 + 9
Vyjmout nebo zkopírovat do schránky vybraný blok textu	R4 + * nebo R4 + 0
Vložit blok textu ze schránky	R4 + #

Místo aktivace textového pole v iPhone můžete také rychlou navigaci ručně vypnout pomocí R1 + 1. V takovém případě nezapomeňte po dokončení rychlou navigaci znovu zapnout pomocí R1 + 1.

Existuje další, rozšiřující skupina příkazů pro úpravy textu. Tyto příkazy lze vyvolat přidržetím R4 a stisknutím klávesy L1 bez uvolnění R4. To znamená, že tyto rozšiřující příkazy se zadávají v podobě R4 + L1, X.

Akce	Klávesová kombinace
Přesunout kurzor na začátek aktuálního textového pole	R4 + L1, 3
Přesunout kurzor na konec aktuálního textového pole	R4 + L1, 9
Odstranit předchozí znak	R4 + L1, 4
Odstranit následující znak	R4 + L1, 6
Odstranit předchozí slovo	R4 + L1, L2
Odstranit následující slovo	R4 + L1, R2
Odstranit všechny znaky do začátku aktuálního řádku na obrazovce	R4 + L1, 1
Odstranit všechny znaky do konce aktuálního řádku na obrazovce	R4 + L1, 7
Odstranit všechny znaky na aktuálním řádku na obrazovce	R4 + L1, 5
Zrušit poslední operaci	R4 + L1, *
Provést operaci znovu	R4 + L1, #

23. Svislá orientace

Rivo lze použít buď ve vodorovné nebo svislé orientaci v závislosti na nastavení.

Vodorovná orientace je výchozí, a i když změníte nastavení Riva na svislou orientaci, při opětovném zapnutí se Rivo přepne na vodorovnou orientaci. Tlačítka ve vodorovné orientaci jsou přímo mapována na odpovídající tlačítka ve svislé orientaci podle názvu. L1, L2, L3 a L4 jsou v tomto pořadí mapována na T1, T2, T3 a T4. R1, R2, R3 a R4 jsou v tomto pořadí mapována na D1, D2, D3 a D4. Ostatní tlačítka jsou mapována na tlačítka se stejnými názvy.

Chcete-li přepnout Rivo do vodorovné orientace, stiskněte L3 + R3. Chcete-li přepnout Rivo do svislé orientace, stiskněte L3 + R3, R3. Při nastavení do svislé orientace Rivo zavibruje.

V podstatě většina příkazů ve vodorovné orientaci je mapována přímo na příkazy ve svislé orientaci pouhým mapováním názvu tlačítek. Některé příkazy používají stejná fyzická tlačítka v obou směrech. Jedná se o klávesy pro nastavení orientace, nastavení režimu média, zkratky pro telefonování, párování Bluetooth/připojení/čísla zařízení a dále nastavení Riva. Některé příkazy nemusejí být ve svislé orientaci k dispozici.

Zkratky pro média ve vodorovné orientaci jsou funkční také ve svislé orientaci za použití stejných fyzických tlačítek.

Dodatek 1. Jazyková nastavení pro češtinu

Angličtině je ve výchozím nastavení přiřazeno tlačítko L3. Kód pro angličtinu (EN) je 1 9. Chcete-li pro tlačítko L3 znovu nastavit angličtinu, stiskněte L3 + L1, 6, 1, 9.

Kód pro češtinu (CS) je 7 7 a lze jej nastavit pro L3 nebo L4. Chcete-li nastavit češtinu pro L3, stiskněte L3 + L1, 6, 7, 7. Chcete-li nastavit češtinu pro L4, stiskněte L3 + L1, L4, 6, 7, 7. Chcete-li zrušit jazyk pro L4, stiskněte L3 + L1, L4, R1.

Mobience QWERTY je výchozí rozložení při psaní písmen a lze jej nastavit stiskem L3 + L1, 4, 1.

Abecední rozložení lze nastavit stiskem L3 + L1, 4, 2.

Ujistěte se, že v iPhoneu pod

Nastavení/Obecné/Klávesnice/Klávesnice

je zvolena česká klávesnice.

Ujistěte se, že v iPhoneu pod

Nastavení/Obecné/Klávesnice/Hardwareová klávesnice/Česká

je pro hardwareovou klávesnici vybrána volba buď „automaticky“ nebo „česká“.

Dodatek 2. Rozložení Mobience QWERTY

Písmenům abecedy jsou v rozložení Mobience QWERTY přiřazena číselná tlačítka následujícím způsobem:

- 1: e, w, q
- 2: t, u, y
- 3: o, p
- 4: a, d, z
- 5: r, f, v
- 6: i, l, j
- 7: s, c, x
- 8: h, g, b
- 9: n, m, k

Dodatek 3. Rozložení ABC

Písmenům abecedy jsou v rozložení ABC přiřazena číselná tlačítka následujícím způsobem:

- 2: a, b, c
- 3: d, e, f
- 4: g, h, i
- 5: j, k, l
- 6: m, n, o
- 7: p, q, r, s
- 8: t, u, v
- 9: w, x, y, z

Dodatek 4. Běžné symboly

Běžným symbolům jsou přiřazena číselná tlačítka následujícím způsobem:

- 1: vykřičník, lomítko, zpětné lomítko
- 2: otazník, vlnovka, obrácená čárka
- 3: mínus, plus, svislá čára
- 4: jednoduchá uvozovka, menší než, levá hranatá závorka
- 5: dvojitá uvozovka, rovnítko, podtržítka
- 6: zavináč, levá kulatá závorka, levá složená závorka
- 7: středník, větší než, pravá hranatá závorka
- 8: dvojtečka, ampersand, znak pro dolar
- 9: čárka, pravá kulatá závorka, pravá složená závorka
- *: hvězdička, procenta, stříška
- 0: tečka
- #: znak pro číslo

Dodatek 5. Psaní diakritických znaků a dalších symbolů

Písmena s diakritikou se zadávají následujícím způsobem:

é: R2 + 1
 ě: R2 + 1, 1
 ť: R2 + 2
 ú: R2 + 2, 2
 ý: R2 + 2, 2, 2
 ó: R2 + 3
 á: R2 + 4
 ď: R2 + 4, 4
 ž: R2 + 4, 4, 4
 ř: R2 + 5
 í: R2 + 6
 š: R2 + 7
 č: R2 + 7, 7
 ů: R2 + 8
 ň: R2 + 9

Další symboly lze zadat v režimu symbolů takto:

€: R2 + 6
 Ł: R2 + #

Dodatek 6. Pomoc s možnými problémy

Rady pro odstranění potíží při užití Riva 2 s aktuální verzí firmwaru.

1. (iOS) Tlačítko plochy (Home) po probuzení iPhone z režimu zamčené obrazovky není funkční.

Když odemknete iPhone přidržetím tlačítka Home na Rivu, může se stát, že tlačítko Home už od této chvíle nebude funkční. V takovém případě Rivo odpojte od iPhone a znovu zapojte. Pro odpojení přidržte tlačítko Klávesnice, dokud se neozvou dvě krátké vibrace. Pak stiskněte tlačítka Klávesnice + Vypínač pro připojení Riva do režimu klávesnice, nebo Zvuk + Vypínač pro připojení do režimu zvuku. Můžete také Rivo vypnout a znovu ho zapnout. Domníváme se, že po probuzení pomocí stisku tlačítka Home iPhone zapomene reagovat na stisknutí tlačítka Home, ale reaguje až po jeho uvolnění. Používání tlačítka Home je v důsledku toho nekonzistentní. Vzhledem k tomu doporučujeme, abyste iPhone neodemykali pomocí tlačítka Home, dokud tento problém nebude odstraněn.

2. (iOS) Nespouští-li se Siri pomocí tlačítka Home, zkuste místo toho stisknout R1 + 3.

3. (iOS) L1 + R4 neprovede uzamčení obrazovky iPhone.

Pokud je VoiceOver vypnutý, příkaz je funkční, ale po jeho zapnutí nikoli. Vypadá to na problém v aktuální verzi systému iOS.

4. Režim zvuku se po odpojení opakovaně zapíná.

Pokud uslyšíte zvuk iPhone z Riva, poté co nastavíte režim klávesnice, znamená to, že Rivo bylo automaticky přepnuto do režimu zvuku na základě žádosti od připojeného zařízení. Stane-li se tak, stiskněte L3 + L1, 7, 4,

5. Tím se příště v těchto případech Rivo odmítne připojit do režimu zvuku. Chcete-li toto nastavení zrušit, stiskněte L3 + L1, 7, 4, 4.

5. (iOS) Některé navigační příkazy nejsou funkční.

Pro většinu z nich postačí zapnout režim rychlé navigace, aby byly funkční. Rychlou navigaci zapnete ručně stiskem R1 + 1. Jestliže problém stále přetrvává, i když máte rychlou navigaci zapnutou, bude pravděpodobně nutné přeinstalovat systém iOS. Ověřili jsme, že přeinstalování systému iOS pomocí iTunes tento problém může vyřešit. Pokud chcete přeinstalovat iOS, nejprve zázálohujte data z Vašeho iPhone v iTunes, poté uveďte iPhone do režimu DFU, nainstalujte iOS a nakonec proveďte obnovení dat. Podrobný postup, jak přeinstalovat iOS, je možno dohledat na internetu.

6. (iOS) Nelze zadávat text do textového pole.

Pro psaní do textového pole je lepší mít vypnutý režim rychlé navigace. Toho docílíte stiskem tlačítka 5, čímž aktivujete textové pole. Pokud problém přetrvává, protože se rychlá navigace sama od sebe opakovaně zapíná, zkuste ji vypnout ručně stiskem R1 + 1. V tomto případě ji však nezapomeňte znovu zapnout pomocí R1 + 1, když je psaní ukončeno.

7. (Android) Rivo je prvotně nastaveno pro práci s VoiceOverem (zařízení iOS).

Po připojení k zařízení s Androidem se přesvědčte, že Rivo je nastaveno pro práci s TalkBack nebo s Hlasovým asistentem v závislosti na tom, který z nich jste nastavili pro užití ve Vašem zařízení. Pro TalkBack v Androidu stiskněte L3 + L1, 3, 4, 2 a pro Hlasového asistenta v Androidu stiskněte L3 + L1, 3, 4, 5. Pro VoiceOver v iOS stiskněte L3 + L1, 3, 6.